

口腔内スキャナー Primescan 感染管理と予防

段差のないタッチスクリーンのため
清拭しやすい。

清拭時には左右タッチパッドボタン
を同時押しして「デバイスロック」
状態にしてワイプします。

タッチパッド式のため、
ノート PC のような凹凸
がない構造。
汚れがたまりにくく、
清拭しやすい。

医療デバイスとして、作
り出されたボディーは可能な限
り凹凸を減らし、ホコリが付着
しにくい表面加工。

モニタを含むノンクリティカル
な表面は、吸収性の高い新しい
綿ガーゼ（無染色のもの）で拭
取り用清浄剤（抗ウイルス性限
定）を含ませてワイプし消毒し
ます。

その後、薬液による変色を避け
るため、湿らせた布で薬液を直
ちに拭き取ります。



カメラスリーブは、
180°C・30分で乾熱滅菌が
可能です
ディスポーザブルスリーブも
用意しています。

標準価格（税別）
57,300円／50本入り



カメラホルダ・ケーブルも
患者さんごとに清拭します。


i
ロベルト・コッホ研究所* (RKI)
ガイドラインに準拠した市場の場合、
ウィンドウスリーブは、RKI ガイ
ドラインに準拠して「セミクリティカル
医療機器 A」に分類されているため、
滅菌処理の必要はありません。

* ロベルト・コッホ研究所 (RKI) は、
1891年に設立されたドイツ連邦共和国
の中央監視研究機関であり、感染症や
非感染性疾患のための連邦政府機関で
ある。

RKIの勧告は科学的根拠に基づいて
おり、ドイツ連邦政府、州、地方の保
健当局および医療専門家に対する助言
的な役割を果たしている。ドイツでは、
医院のスタッフを守るための法律と患
者を守るための法律が定められてお
り、頻繁に改定されている。医院のス
タッフと患者を守るためのガイドライ
ン（指針）をRKIが発行しており、法
律に反映されている。
（『Quint Dental Gate』より引用）

ユーザー様へ

日頃のメンテナンスの詳細につきましては、
お手持ちの『取扱説明書』を
ご覧ください。

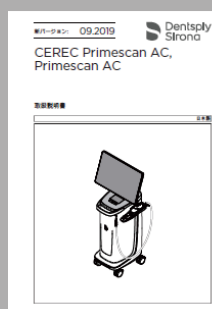

Primescan
取扱説明書
「6. メンテナンス」
を必ずお読みください