

# Thermafil

サーマフィル

1本で三次元的根管充填



# 製品特長

## 1 時間短縮

1本の材料で、垂直及び側方への加圧ができ、三次元的な根管充填が、短時間で終了できます。細く彎曲した根管にも対応できます。

## 2 簡便な操作

根管拡大形成後、1本の材料とシーラを使用するシンプルなシステムのため、難しい操作は不要です。

## 3 除去が容易


キャリアの部分側面に溝が付与されているため、除去が必要な際、Hファイル等で容易に除去できます。(右記断面図参照)



■断面図

キャリア部分側面に溝を付与

## 使用手順

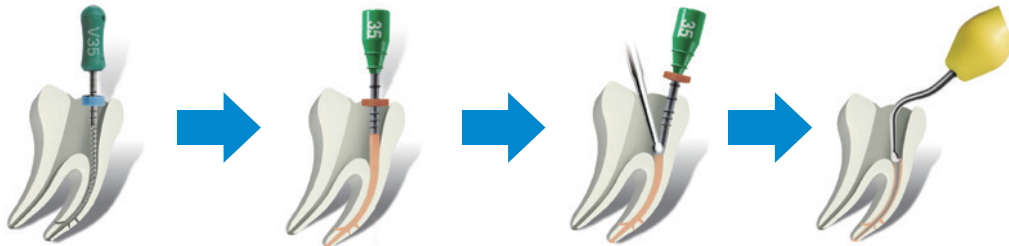

試適用 NiTi ファイル、ベリファイヤで作業長の確認を行い、根管壁へシーラを塗布します。

サーマプレップ<sup>2</sup>で加温したメルファースーマフィルを、作業長まで挿入します。

メルファースーマフィル充填完了後、サーマカットで不要なキャリア部分を切削します。

プラガー等を使用し、根管口付近の余剰なガッタパーチャのコンデンスを行います。

■臨床例



| 製品番号          | 製品名                   |
|---------------|-----------------------|
| A016602502000 | メルファースーマフィル #20 6本入り  |
| A016602502500 | メルファースーマフィル #25 6本入り  |
| A016602503000 | メルファースーマフィル #30 6本入り  |
| A016602503500 | メルファースーマフィル #35 6本入り  |
| A016602504000 | メルファースーマフィル #40 6本入り  |
| A016602504500 | メルファースーマフィル #45 6本入り  |
| A016602505000 | メルファースーマフィル #50 6本入り  |
| A016602505500 | メルファースーマフィル #55 6本入り  |
| A016602506000 | メルファースーマフィル #60 6本入り  |
| A016602507000 | メルファースーマフィル #70 6本入り  |
| A016602508000 | メルファースーマフィル #80 6本入り  |
| A016602509000 | メルファースーマフィル #90 6本入り  |
| A016602510000 | メルファースーマフィル #100 6本入り |

| 製品番号          | 製品名                               |
|---------------|-----------------------------------|
| A016602511000 | メルファースーマフィル #110 6本入り             |
| A016602512000 | メルファースーマフィル #120 6本入り             |
| A016602514000 | メルファースーマフィル #140 6本入り             |
| A016602590000 | メルファースーマフィル アソート #20-#25 6本入り     |
| A016700090000 | メルファースーマフィル ポステリアキット #20-40 6本入り  |
| A016800090000 | メルファースーマフィル アンテリアキット #45-100 6本入り |
| A034802502000 | メルファースーマフィル #20 30本入り             |
| A034802502500 | メルファースーマフィル #25 30本入り             |
| A034802503000 | メルファースーマフィル #30 30本入り             |
| A034802503500 | メルファースーマフィル #35 30本入り             |
| A034802504000 | メルファースーマフィル #40 30本入り             |

| 包装  |
|---|
| セット:ポステリアキット20本入り<br>内容:#20, #25, #30, #35, #40 各4本<br>価格 ¥12,580   |
| セット:アンテリアキット20本入り<br>内容:#45, #50, #55, #60, #70 各3本<br>#80, #90 各2本、#100 1本<br>価格 ¥12,580                       |
| セット:#20-#25 6本入り<br>内容:#20, #25 各3本<br>価格 ¥3,930  |
| 単品:6本入り(種類別)<br>#20, #25, #30, #35, #40, #45, #50, #55, #60, #70, #80, #90, #100, #110, #120, #140<br>価格 ¥3,930 |
| 単品:30本入り(種類別)<br>#20, #25, #30, #35, #40<br>価格 ¥18,250  |

## 関連製品



**歯科材料加温器  
サーマプレップ2**  
寸法: W155 X D178 X H81  
重量: 約0.56 kg  
電源電圧: 115V  
周波数: 50/60Hz  
消費電力: 最大 380W  
製品番号: B00THPR115VUS  
価格 ¥81,690

### 特長 サーマフィル専用加温器

#### ◆ 時間短縮

スタート後、約15秒から約90秒でサーマフィルを適切な温度に加温でき、速やかに根管充填ができます。

#### ◆ 簡便な操作

サイズ別加温が簡単にでき、セッティングの煩雑がありません。

#### ◆ 清掃が簡単

クリーニングモードの搭載により、毎回オープンの中をクリーンな状態に保てます。



**歯科用ファイル  
ベリファイヤ**  
長さ: 25mm  
サイズ: #20, #25, #30, #35, #40, #45, #50, #55, #60, #70, #80, #90  
単品 6本入り(種類別)  
セット 6本入り(#20~#45 各1本入り)  
セット 6本入り(#50~#90 各1本入り)  
製品番号: A017502502000~  
価格 ¥2,710



**歯科用スチールバー  
サーマカット**  
長さ: 25mm  
サイズ: #010, #012, #014, #016  
単品 6本入り(種類別)  
アソート 6本入り  
(#010, #016 各1 #012, #014 各2本)  
製品番号: A005032501000~  
価格 ¥2,710



**歯科用スチールバー  
ポストスペースバー**  
長さ: 25mm, 31mm  
サイズ: #005, #007  
包装: 6本入り(種類別)  
製品番号: A005131300500~  
価格 ¥6,760

表示価格は、2023年7現在の標準価格で消費税は含まれません。\*仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

**デンツプライシロナ株式会社**

本社/〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5階

**カスタマーサービス**

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

☎0120-461-868 FAX:0120-120-659

[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)