

+

WE  
KNOW  
ENDO.



# WaveOne<sup>®</sup> Gold

ウェーブワン ゴールド

Surf the canal with confidence

---

 Dentsply  
Sirona

# 製品特長


## 1 柔軟性の向上

- GOLDワイヤーにより、優れた柔軟性を実現

デンツプライシロナ独自の熱処理工程により誕生した優れた柔軟性と疲労破折抵抗性を有するNiTiです。

**GOLDワイヤー**


### 柔軟性

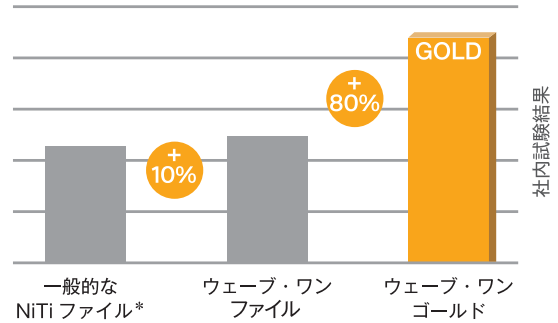

## 2 患者さんの安全性に配慮

- ウェーブ・ワン ファイル (当社従来品) に比べ、疲労破折抵抗性が50%向上し、ファイルの破折リスクが減少
- プロテーパー\* (当社従来品) に比べ、歯質への食い込みを軽減


### 疲労破折抵抗性

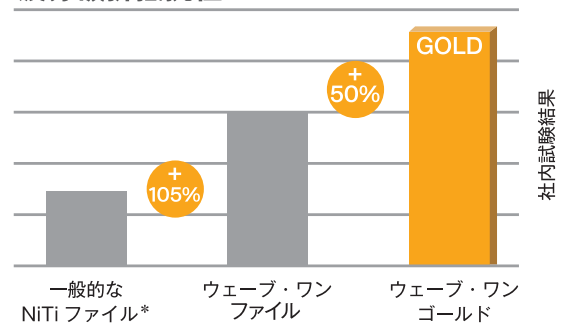

## 3 治療の効率化


- 切削効率が向上
- 約80%の症例に1本で対応でき、根管拡大・形成時間が短縮

### 根管拡大・形成時間

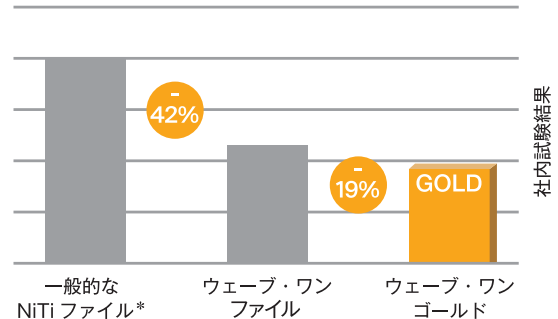


## ファイルデザイン

Dr. C.Ruddle、Dr. J.Webber、Dr. W.Pertot、Dr. S.Kuttler が開発チームに参加

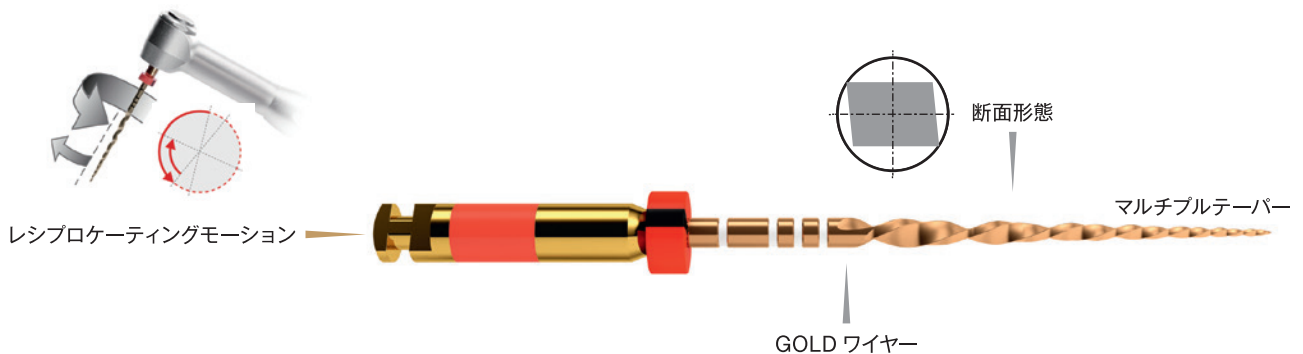

- 根管壁に1つもしくは2つのカッティング・ポイントが接触
- 接触する位置が変わることで、ファイルの食い込みを軽減

# 使用手順

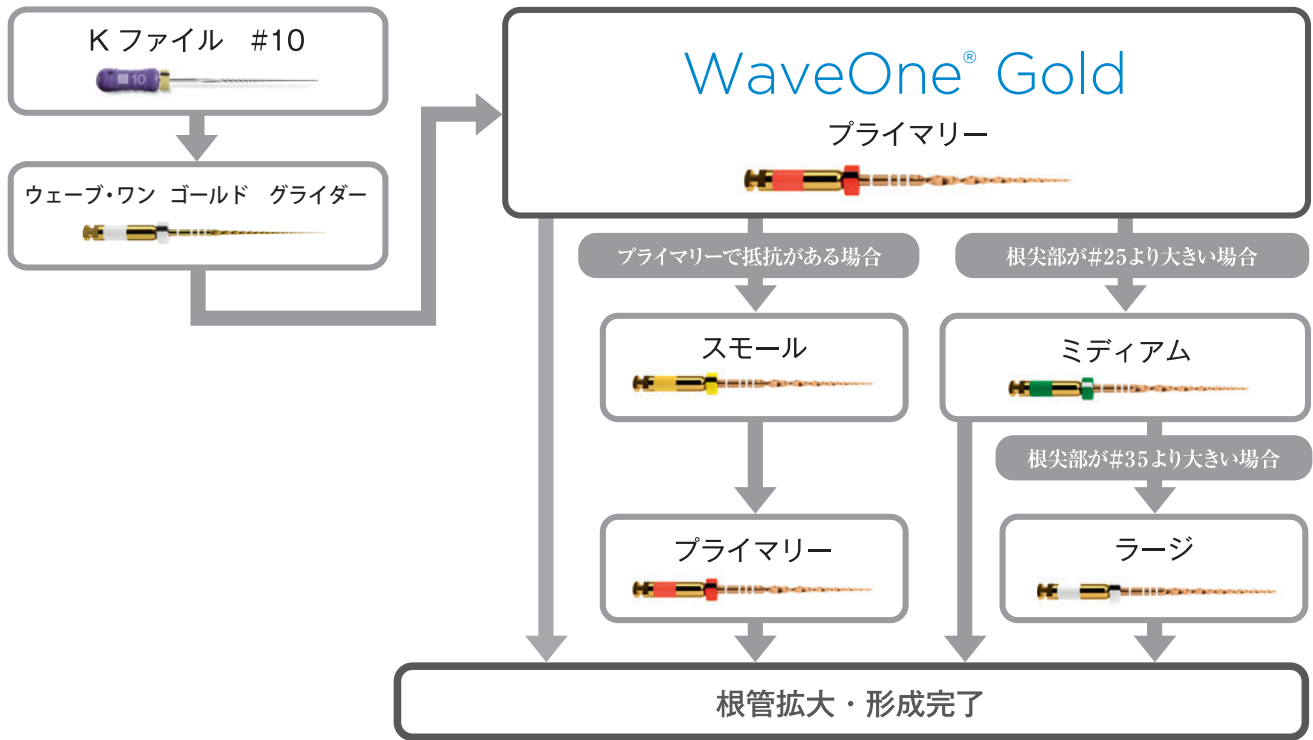

## すぐに使用できるシングルユースファイル

- シンプル：滅菌済みパッケージのため開封後すぐに使用可能
- 交差感染のリスク低減：1F-1P (ワンファイル-ワンペーシェント)
- 切削効率の向上



上顎左側第一大臼歯

	種 類	先端径 / テーパー	長さ (mm)	シャンク長さ (mm)
	スモール	#20 .07	21/25/31	11
	プライマリー	#25 .07	21/25/31	11
	ミディアム	#35 .06	21/25/31	11
	ラージ	#45 .05	21/25/31	11

# 根管治療の流れ



## 製品仕様

製品番号	製品名	先端径/テーパ	長さ	入数	標準価格
BSTW1GG321015	ウェーブ・ワンゴールド グライダ	#15 .06	21 mm	3本	¥7,220
BSTW1GG325015			25 mm		
BSTW1GG331015			31 mm		
A0753221G0S03	ウェーブ・ワンゴールド スモール	#20 .07	21 mm	3本	¥7,220
A0753225G0S03			25 mm		
A0753231G0S03			31 mm		
A0753221G0P03	ウェーブ・ワンゴールド プライマリー	#25 .07	21 mm	3本	¥7,220
A0753225G0P03			25 mm		
A0753231G0P03			31 mm		
A0753221G0M03	ウェーブ・ワンゴールド ミディアム	#35 .06	21 mm	3本	¥7,220
A0753225G0M03			25 mm		
A0753231G0M03			31 mm		
A0753221G0L03	ウェーブ・ワンゴールド ラージ	#45 .05	21 mm	3本	¥7,220
A0753225G0L03			25 mm		
A0753231G0L03			31 mm		

## 3シートパック

製品名	内容	標準価格
ウェーブ・ワンゴールド グライダ3シート	3本×3シート 長さ:21 / 25 mm	¥21,650
ウェーブ・ワンゴールド3シート	3本×3シート 長さ:21 / 25 mm サイズ:スモール/プライマリー/ミディアム/ラージ	¥21,650
ウェーブ・ワンゴールド GSP3シート	長さ:21 / 25 mm ウェーブ・ワンゴールドグライダ、スモール、プライマリー 各1シート	¥21,650

## 専用ガッタパーチャ・ペーパーポイント

製品名	内容	標準価格
ウェーブ・ワンゴールド CF ガッタパーチャ	60本 サイズ:スモール/プライマリー/ミディアム/ラージ	¥4,350
ウェーブ・ワンゴールド CF ガッタパーチャ アソート	スモール12本、プライマリー24本、ミディアム12本、ラージ12本	¥4,350
ウェーブ・ワンゴールド用ペーパーポイント	180本 サイズ:スモール/プライマリー/ミディアム/ラージ	¥5,260

## 関連製品

製品名	内容
X-スマート プラス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コントロールユニット(本体)</li> <li>・Fタイプスプレーノズル</li> <li>・モーターハンドピース</li> <li>・ACアダプター</li> <li>・コントラングル(ギヤ比6:1)</li> <li>・ハンドピーススタンド</li> </ul>
AH プラス	チューブセット ジェットセットスターター
ガッタコア ピンク	6本入(#20~#90) 30本入(#20~#40)

販売名: ウェーブ・ワンゴールド  
 販売名: X-スマート プラス  
 販売名: AH プラス  
 販売名: ガッタコア ピンク  
 販売名: ウェーブ・ワンゴールド ガッタパーチャ  
 販売名: READYSTEEL メルファーク ファイル  
 販売名: メルファープローテーパー  
 販売名: ウェーブ・ワンファイル

一般的名称: 電動式歯科用ファイル  
 一般的名称: 歯科用根管拡大装置  
 一般的名称: 歯科用根管充填シール  
 一般的名称: 歯科用根管充填固状材料  
 一般的名称: 歯科用根管充填固状材料  
 一般的名称: 歯科用ファイル  
 一般的名称: 電動式歯科用ファイル  
 一般的名称: 電動式歯科用ファイル

医療機器認証番号: 227AGBZX00033000 クラス分類: II(管理)  
 医療機器認証番号: 224AKBZX00131000 クラス分類: II(管理・特管)  
 医療機器認証番号: 220AABZX00327000 クラス分類: II(管理)  
 医療機器認証番号: 227AGBZX00042000 クラス分類: II(管理)  
 医療機器認証番号: 229AGBZX00015000 クラス分類: II(管理)  
 医療機器届出番号: 13B1X10236Y04020 クラス分類: I(一般)  
 医療機器承認番号: 22200BZX00049000 クラス分類: II(管理)  
 医療機器認証番号: 224AGBZX00096000 クラス分類: II(管理)

\*表示価格は、2023年7月現在の標準価格で消費税は含まれません。 \*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

**デンツプライシロナ株式会社**

本社/〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5階

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)

☎0120-461-868 FAX:0120-120-659

[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)