


Aquasil Ultra

アクアジルウルトラ

優れた親水性で細部の印象まで
確実にキャッチ

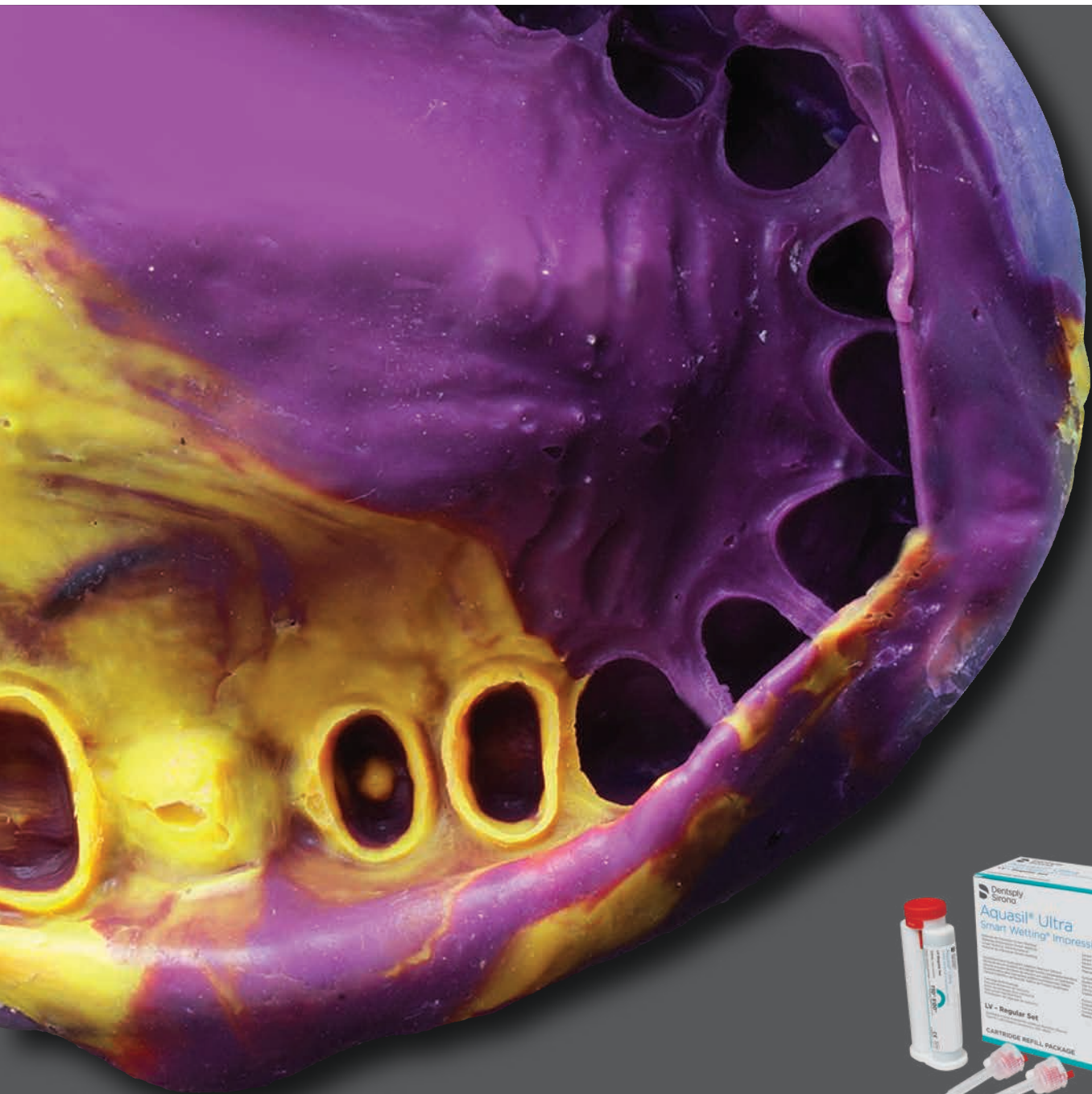

Ultra Wettable

超親水性

水分との馴染みが非常に高いため、歯肉縁下でも唾液や浸出液などの影響を受けにくく、縁下マージン部の気泡の巻き込みや流れ不足といった再印象のリスクを軽減します。




水との馴染みの良いウォッシュマテリアルが歯肉縁下の細部までしっかり流入します。

Ultra Strong

超高強度

親水性によって細部まで流入した印象材がちぎれずに採れる強度を有しています。アクアジルウルトラ独自の架橋結合様式により、従来品に比べて高密度にシリコーンが重合してゆくため、引き裂き強度が強く、歯肉溝内や歯肉縁下マージンのような細部でもちぎれずにしっかりと再現します。

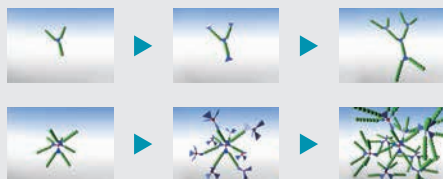


(図上) 弊社従来品：2次元的な架橋結合様式

(図下) アクアジルウルトラは4官能性シリコーンとの相乗作用により親水性や操作性を損なうことなく高い引き裂き強度を実現

Ultra Forgiving

高い操作性

初期硬化までの操作余裕時間が長いため、全顎印象などの大きなケースにおいてもトレーマテリアルの圧接のタイミングが合わせやすい設計になっています。トレーマテリアルとウォッシュマテリアルが良好に馴染み、精度の高い印象採得が可能です。

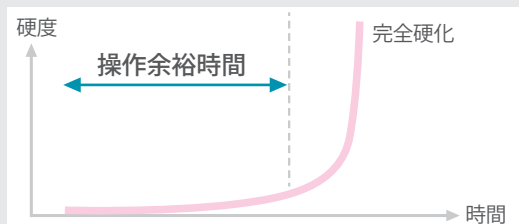


初期硬化までの操作余裕時間が長く余裕を持って操作できます。



歯肉縁下にもしっかり入り込み、気泡の混入もなく印象が採れています。



細部もちぎれることなく縁下マージンが再現されています。

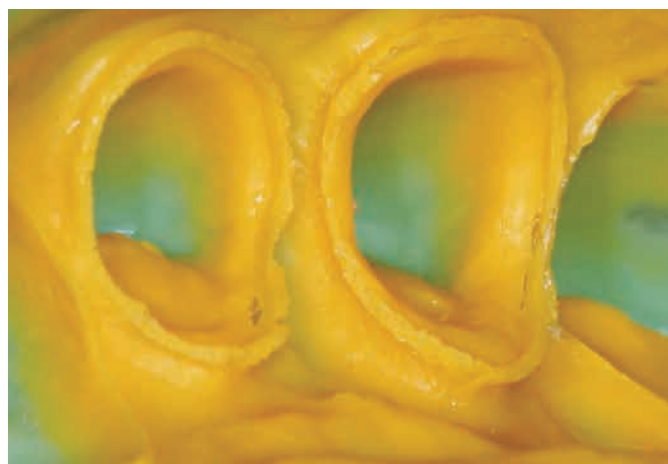

支台歯の印象。内面でトレーマテリアルとウォッシュマテリアルが馴染んでいる様子が確認できます。

写真提供：内山徹哉先生（東京都開業）



NCIS (New Cartridge Integrated System)


独自の技術、デザインを採用したミキシングチップにより練和の質が向上し、かつ、チップ内に残留する材料の廃棄ロスを軽減します。



NCIS製品特長



臨床での使用感

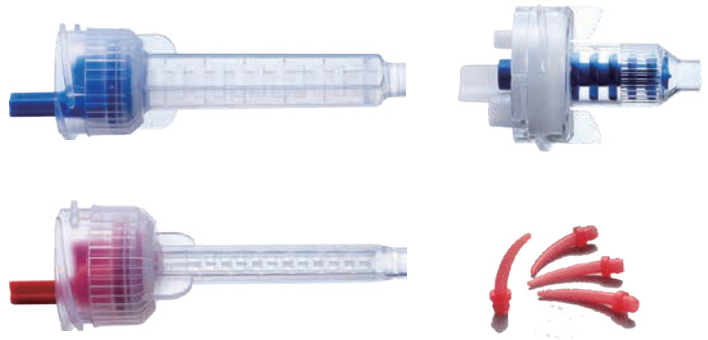

Duomix II & DECA

自動練和により均質な印象材を築盛できます。また、短時間（全額トレー約 20 秒）* で築盛できるため、トレーマテリアル圧接のタイミングも合わせやすくなります。

* ターボモード使用の場合



1 練和時間の短縮

通常のスPEEDモードに加え、倍の速さで押し出すターボモードを選択できるようになり、手早く均一な印象材の準備が可能になりました。


2 簡単操作

印象材の使いきりを検知し、自動で戻るプランジャー機能 2 より簡単にカートリッジの交換作業が出来ます。

3 見やすいパネル設計

残量インジケーターと、残り 1 回分の使用をお知らせするパイロットランプ 2 より、カートリッジの残量と、交換の時期をいつでも確認できます。

全額トレー 1 個に印象材を盛る際のスピード比較

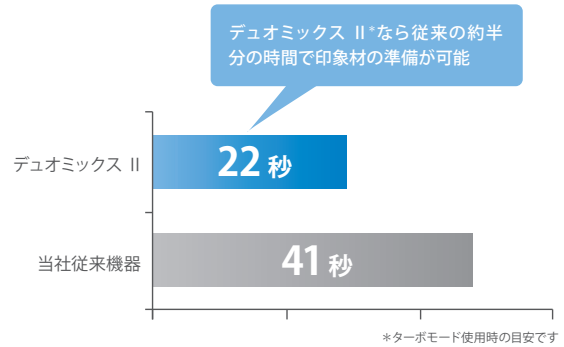

Product Lineup & Usage


種類・色調	トレー用			ウォッシュ用		
	リジット	ヘビー	モノフェーズ	LV	XLV	
硬さ						
症例	流動性	低い	やや低い	普通	高い	非常に高い
	クラウン・インレー等	○	○	○	◎	◎
	ブリッジ	○	○	○	◎	◎
	デンチャー	○	○	◎(無歯顎印象等)	◎(有歯顎印象等)	◎(咬座印象等)
	インプラント	○	○	○	◎	◎
操作余裕時間	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	
口腔内保持時間	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	約2分30秒	



アクアジル ウルトラ ヘビー RS (単品)



アクアジル ウルトラ DECA モノフェーズ RS

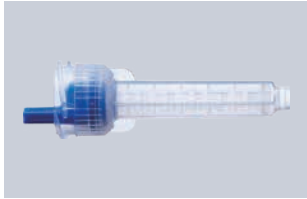

ミキシングチップ ブルー



ダイナミックミキシングチップ



口腔内注入用チップ レッド



デュオミックス2

商品番号	商品名	標準価格
678768	アクアジル ウルトラ XLV RS 単品	11,760 円
678771	アクアジル ウルトラ LV RS 単品	11,760 円
678773	アクアジル ウルトラ モノフェーズ RS 単品	11,760 円
678775	アクアジル ウルトラ ヘビー RS 単品	11,760 円
678777	アクアジル ウルトラ リジット RS 単品	11,760 円

内容	
	● XLV / LV / モノフェーズ / ヘビー / リジット (ベース及びキャタリスト : 50mL) : 4 個 ● ミキシングチップ : 12 本 (XLV / LV : ミキシングチップ レッド、モノフェーズ / ヘビー / リジット : ミキシングチップ ブルー)

商品番号	商品名	標準価格
678782	アクアジル ウルトラ DECA モノフェーズ RS	26,950 円
678786	アクアジル ウルトラ DECA ヘビー RS	26,950 円

内容	
	● DECA モノフェーズ / DECA ヘビー (ベース及びキャタリスト : 380mL) : 2個 ● DECA ダイナミックミキシングチップ : 20個

関連商品

商品番号	商品名	標準価格
778217V	ミキシングチップ レッド (40 個入)	2,490 円
778216V	ミキシングチップ ブルー (40 個入)	2,490 円
778953V	ダイナミックミキシングチップ (40 個入)	3,970 円
626383	口腔内注入用チップ レッド (100 個入)	2,980 円
2761003000	デュオミックス 2 (印象自動練和器) : 1 台	160,190 円

販売名:アクアジル ウルトラ 一般的名称:歯科用シリコーン印象材 医療機器認証番号:221AFBZX00079000 クラス分類:クラスII (管理医療機器)
販売名:デュオミックス2 一般的名称:歯科用印象材混ごう器 医療機器届出番号:13B1X10236Y03500 クラス分類:クラスI (一般医療機器)
販売名:ミキシングチップ 一般的名称:歯科用練成器具 医療機器届出番号:13B1X10236Y00240 クラス分類:クラスI (一般医療機器)
販売名:口腔内注入用チップ 一般的名称:歯科用注入器具 医療機器届出番号:13B1X10236Y00250 クラス分類:クラスI (一般医療機器)

デュオミックス II 仕様

電圧	消費電力	サイズ(高さ×幅×長さ)	重量
100V, 50/60Hz	280VA	330×190×380mm	7.0kg

*表示価格は、2023年7月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-461-868 FAX:0120-120-689

www.dentsplysirona.com

