









	<h3>シートクッションの清掃とケア</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>デンツプライシロナが承認した清掃剤にて表面の拭清掃を行います。</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 原液を直接スプレーし布でふき取る</li> </ul> <p>デュールデンタル FD360レザークア 500ml 標準価格 ¥6,000 (税別)</p> </div> <div style="margin-left: 20px; text-align: center;">  <p>清掃用のスポンジは、 外来待合室のリファーマには 使用しないでください。</p> </div> </div>
<p>Sinius, Sinus TS</p> <p>Sinius CS</p>	<h3>タービンホースのコットンロール交換</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>タービンホースのコットンロールを交換します。ドリップ容器を下にスライドさせ、コットンロールを新しいものに取り換えたのち、ドリップ容器を元に戻します。</li> </ul>
	<h3>排水回路の清掃</h3> <p>洗浄剤添加機能が付いている場合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>洗浄剤の説明書に従い調製し、スピットンに1L注ぎます。説明書に記載された暴露時間を置いた後、1L以上の水をスピットンに流しすすいでください。</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>放置（暴露）時間の目安： オルトプラス：60分以上</p> </div> <p style="color: red;">洗浄用アダプターを使用しバキュームホース洗浄を毎日行っている場合は不要です。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 50倍に希釈しバキュームより吸引し使用</li> </ul> <p>デュールデンタル オルトプラス 2.5L 標準価格 ¥12,000 (税別)</p> </div> </div>
	<h3>フットコントローラーの清掃</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>水で湿らせた布でフットコントローラーの下側を拭いてください。</li> </ul>
<p>グリース</p>	<h3>バキュームハンドピースへのグリース塗布</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>熱消毒または滅菌後、および毎週一回バキュームハンドピースを取り外し、Oリングにグリースを塗布してください。</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>デンツプライシロナ TCメンテナンスグリース7g</p> <p>7g 定 価 ¥ 1,450 (税別)</p> </div> </div>



### 排水カートリッジの熱消毒

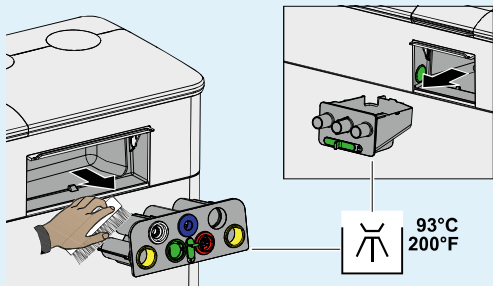- サニテーションアダプターやバキューム洗浄カートリッジは取り外して熱消毒を行います。緑色のレバーを動かし、カートリッジのロックを解除します。

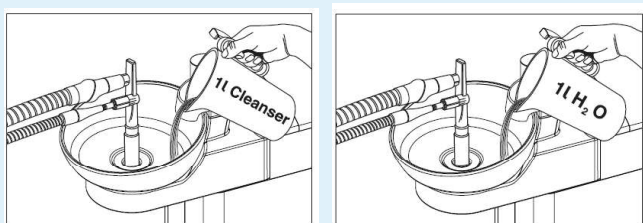

### 排水回路に詰まりがある場合には

- より強力なクリーナーで洗浄します。スピットンに洗浄用アダプターを立て、1Lの洗浄液を注ぎ吸引します。(20倍希釈)  
吸引後は30分以上120分以下の間放置し、十分に暴露させ、最後に1Lの水を吸引させます。

酸性溶剤のため、指定時間以上の放置は吸引回路が損傷する恐れがあります。

120分以上放置しないでください。



- 汚れの固着を解消し、強力洗浄するスペシャルクリーナー  
デュールデンタル  
MD555 フロークリーナー  
2.5L  
標準価格 ¥ 8,000 (税別)