


Intego pro

患者さんごとに行うメンテナンス

詳細については取扱説明書の「5 診療チームによるお手入れ、清掃、メンテナンス」をご参照ください。

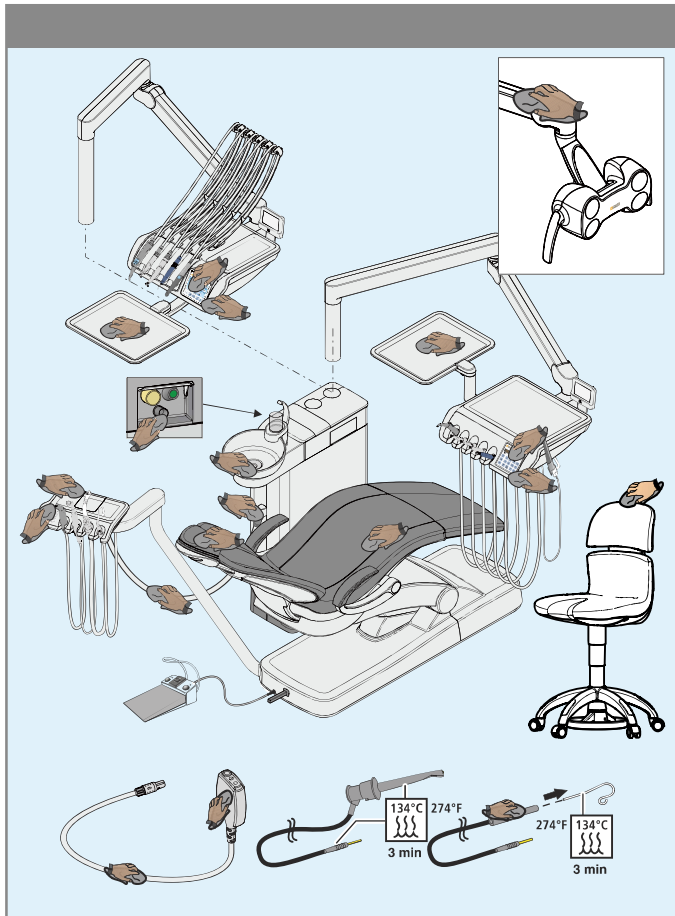

シート、パネル等の表面清掃／消毒

● デンツプライシロナが承認した清掃剤／消毒剤にて表面の拭き清掃を行います。

- ・表面とクッションの消毒
- ・ユーザーインターフェース（タッチパネル）の消毒
- ・インスツルメント類の手入れ、消毒/ 滅菌
- ・アペックスローター部品の洗浄と消毒/ 滅菌
- ・インスツルメントホルダーの消毒
- ・ハンドルの消毒
- ・トレイの消毒
- ・バキュームホース洗浄用コネクタの消毒
- ・无影灯のメンテナンスと清掃

消毒



● 清潔な布やペーパータオルに付けてふき取る
デュール
FD366センシティブ
1L
定価¥3,500 (税別)



● 表面をふき取り汚れを落とす
シュルケ&マイヤー
マイクロジットセンシティブワイプ
200枚入
定価¥4,700 (税別)

清掃




● 原液を直接スプレーし布でふき取る
デュール
FD360レーザーケア
500ml
定価¥6,000 (税別)



FD360付属の清掃用スポンジは、外来待合室のソファには使用しないでください。



FD360は、アームレストやダブルアーティキュレーティング型ヘッドレストのクロムメッキ面には使用しないでください。変色するおそれがあります。

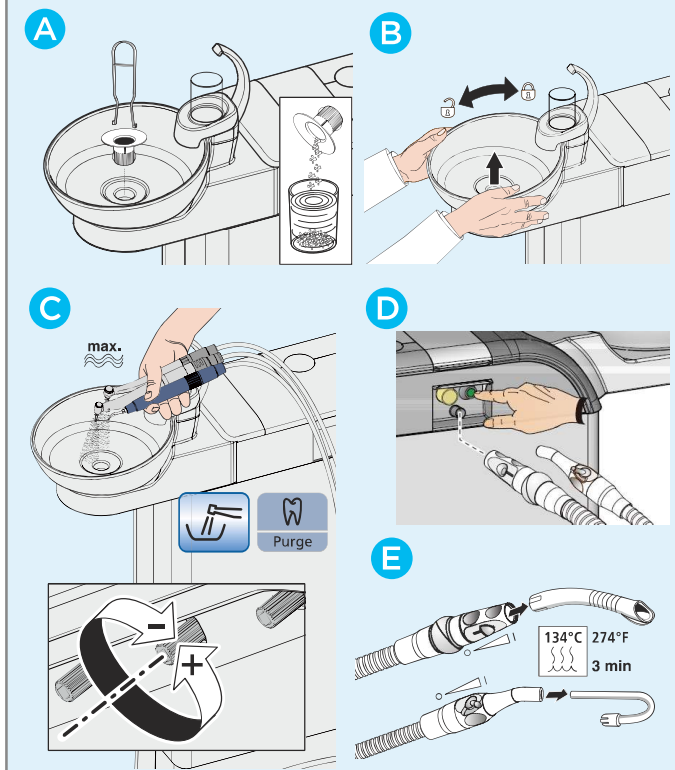

水回路とバキューム装置の清掃／消毒

A スピットンのトラップを清掃します。

B スピットンをデンツプライシロナ承認の洗浄剤で清掃します。

C 使用したインスツルメントのパーズ（水の入れ替え）を水量を最大に行います。

裏面： C の項目参照

D バキュームホース、ハイダホースの洗浄を行います。

裏面： D の項目参照

E バキュームハンドピースを滅菌します。各チップを滅菌されたものと交換します。

B 清掃剤







● 2-3回噴射しスポンジで伸ばして使用
デュール
MD550
750ml
定価¥3,200 (税別)

C

パーズ機能

使用したインスツルメントを一度にフラッシングする機能。設定した時間だけフラッシングされます。

イージーパッド用

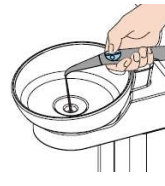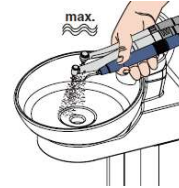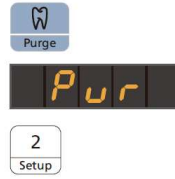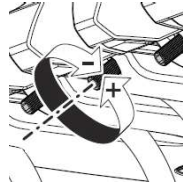

上図キーを押し1分以上水を流してスピットンを洗浄します。

Setupキーを押し◀▶からパーズ (Pu) を表示。◀▶を使用し時間を設定しSetupキーを押し確定します。20秒以上で設定してください。

インスツルメントホルダー下にある水量調節を左に回し注水量を最大にします。






Purgeキーを押し、次にSetupキーを押します。

インスツルメントをスピットン上に保持し排水を行います。※設定した時間、排水されます。

続いてシリンジをスピットン上に保持し、ウォーターキーを20秒以上押し排水します。

「2」キーを押しプログラムを終了します。

イージータッチ用

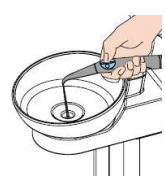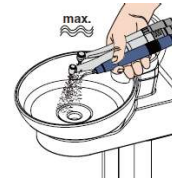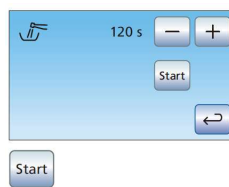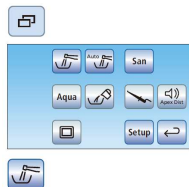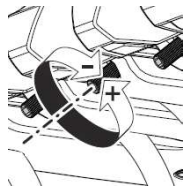

上図キーを押し1分以上水を流してスピットンを洗浄します。

インスツルメントホルダー下にある水量調節を左に回し注水量を最大にします。

パーズ機能キーを押します。

一十キーを使用し20秒以上の時間を設定したのち、スタートキーを押しパーズをスタートさせます。

インスツルメントをスピットン上に保持し排水を行います。※設定した時間、排水されます。

続いてシリンジをスピットン上に保持し、ウォーターキーを20秒以上押し排水します。

「Stop」キーを押し、プログラムを終了します。


Tips

ハンドピースの適性注水量の調整位置

パーズ・オートパーズ・サニテーションなどの排水機能を使用時は、注水量を最大にする必要があります。また、患者さんに安全な治療を提供するためには、最低注水量を守る必要があります。



シリンジ
130ml/分(固定)

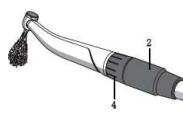

タービン
最低：50ml/分以上
最大：160ml/分



コントラ
最低：50ml/分以上
最大：120ml/分




超音波スケーラー
最低：30ml/分以上
最大：60ml


D

バキュームホースの洗浄

バキュームシステムは、細菌を含んだ分泌物、唾液、血液を吸引します。そのため、衛生上の理由から定期的な洗浄が必須です。

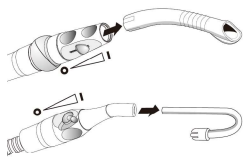


チップを取り外し、洗浄するホースの吸引フローを最大にスライドします。洗浄しないホースは最小に設定します。

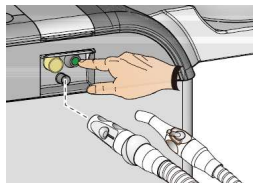

洗浄するホースを差し込み、ボタンを押しスタートします。信号音が鳴ると洗浄は終了です。

洗浄剤添加機能とは？(オプション)

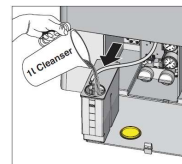

洗浄剤を設定した濃度に希釈しバキューム自動洗浄システムに供給する機能のこと。自身で洗浄液を混合する必要はありません。洗浄剤添加機能を使用すると、診療後の集中洗浄は必要ありません。

洗浄剤添加機能が付いていない場合

バキュームホースの自動洗浄を行う際、水で洗浄されます。午前終了後、午後終了後に洗浄液を使用した集中洗浄が必要になります。

洗浄剤添加機能が付いている場合

バキュームホースの自動洗浄を行う際、洗浄剤が入った水で洗浄されます。