
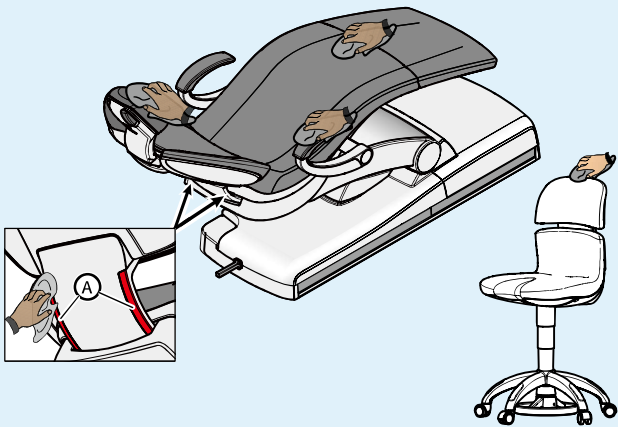
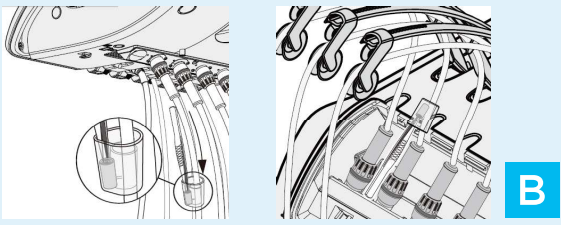
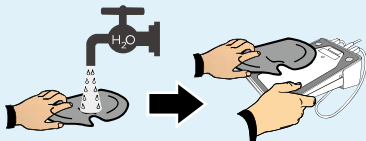


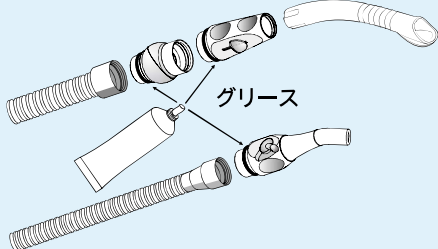

# Intego pro

## 週ごとに行うユニットのお手入れ

詳細については取扱説明書の

「5 診療チームによるお手入れ、清掃、メンテナンス」をご参照ください。

	<h3>シートクッションの清掃とケア</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>デンツプライシロナが承認した清掃剤にて表面の拭清掃を行います。</li> <li>A 部分は水で湿らせた布で拭いてください。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="826 600 1117 750"> <p><b>消毒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>清潔な布やペーパータオルに付けてふき取る</li> <li>デュール FD366 センシティブ 1L 定価 ¥3,500 (税別)</li> </ul> </div> <div data-bbox="1173 600 1460 750"> <ul style="list-style-type: none"> <li>表面をふき取り汚れを落とす</li> <li>シユルケ&amp;マイヤー ミクロジットセンシティブワイブ 200枚入 定価 ¥4,700 (税別)</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="826 761 1117 907"> <p><b>清掃</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原液を直接スプレーし布でふき取る</li> <li>デュール FD360 レザーケア 500ml 定価 ¥6,000 (税別)</li> </ul> </div> <div data-bbox="1173 918 1460 996"> <p>FD360は、アームレストやダブルアーティキュレーティング型ヘッドレストのクロムメッキ面には使用しないでください。変色するおそれがあります。</p> <p>FD360付属の清掃用スポンジは、外来待合室のソファには使用しないでください。</p> </div> </div>
 <p>TSドクターユニット      CSドクターユニット</p>	<h3>タービンホースのコットンロール交換</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>タービンホースのコットンロールを交換します。ドリップ容器をスライドさせ、コットンロールを新しいものに取り換えたのち、ドリップ容器を元に戻します。</li> <li>CSドクターユニットの場合は裏面 <b>B</b> をご参照ください。</li> </ul>
	<h3>フットコントローラーの清掃</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>水で湿らせた布でフットコントローラーの下側を拭いてください。</li> </ul>
	<h3>バキュームハンドピースへのグリース塗布</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>熱消毒または滅菌後、および毎週一回バキュームハンドピースを取り外し、Oリングにグリースを塗布してください。</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>デンツプライシロナ TCメンテナンスグリース 7g 7g 定価 ¥ 1,450</p> </div> </div>
	<h3>スピットン排水経路の清掃</h3> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px 0;"> <p>洗浄剤添加機能が付いている場合のみ</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>A スピットンの排水経路を週1回清掃します。</li> </ul> <p style="text-align: right; color: red;">裏面： <b>A</b> の項目参照</p>

# A

## スピットン排水経路の清掃

### 洗浄剤添加機能が付いている場合のみ

洗浄剤添加機能が付いている場合、スピットンの排水口は洗浄/消毒されないため、週1回洗浄液で洗浄を行います。

頻度：週1回




●50倍に希釈しバキュームより吸引し使用  
シュルケ&マイヤー  
アスピロマチック  
2L  
定価¥6,950 (税別)



●50倍に希釈しバキュームより吸引し使用  
デュール  
オロトルプラス  
2,5L  
定価¥12,000 (税別)


#### <洗浄の手順>

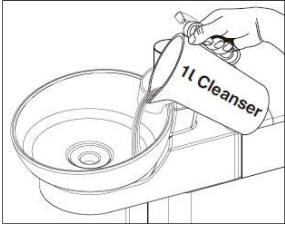

1. 洗浄液メーカーの取扱説明書に従って容器に1ℓの洗浄液を入れます。
2. スピットンに洗浄液を入れ、洗浄液メーカーが指定する暴露時間、放置します。

放置（暴露）時間の目安：  
アスピロマチック：30分以上  
オロトルプラス：60分以上


#### <洗浄剤のすすぎ>

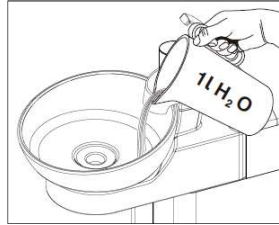


1. スピットンに1ℓ以上の水を注ぎ、洗浄液を洗い流してください。

# B


## CSドクターユニットのコットンロール交換

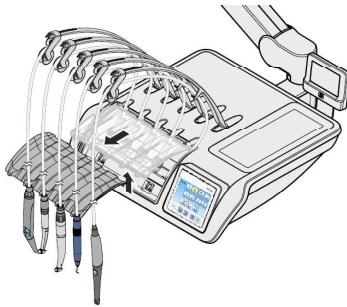

1. 各インスツルメントを手前に引き出し、インスツルメントホルダーを取り外します。

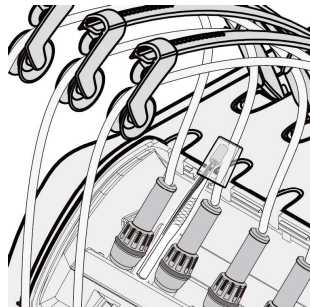

2. ドリップ容器をスライドさせ、コットンロールを交換した後、元に戻します。

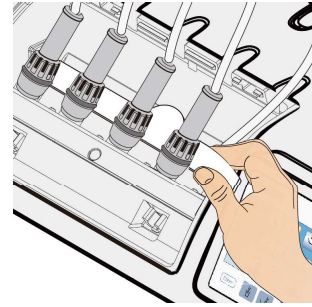

3. インスツルメント接続部の下にあるオイルキャッチャーを引き出し交換します。