


Intego

患者さんごとに行うメンテナンス

詳細については取扱説明書の「5 診療チームによるお手入れ、清掃、メンテナンス」をご参照ください。

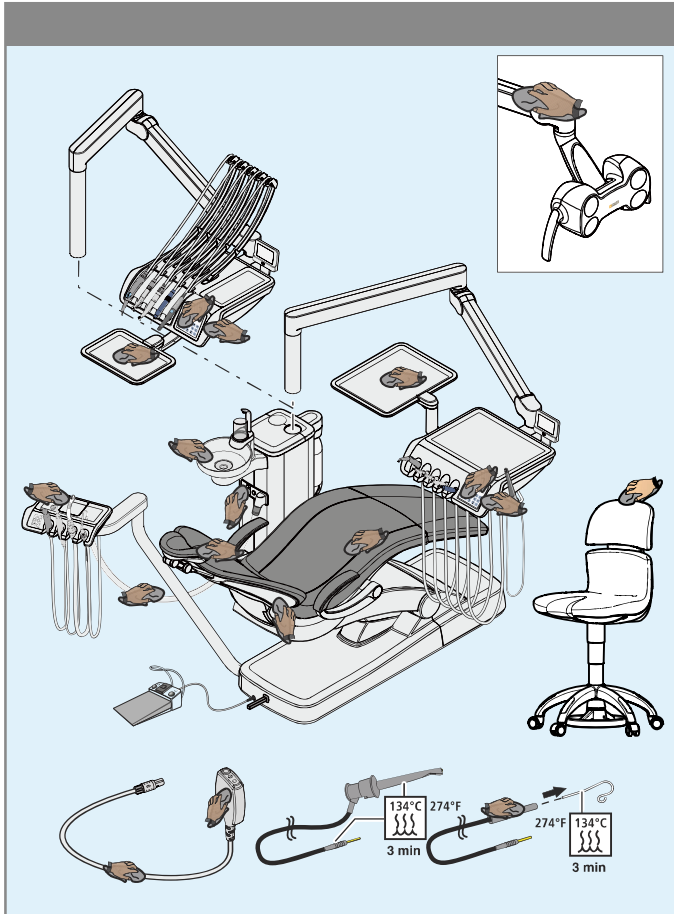


シート、パネル等の表面清掃／消毒


●デンツプライシロナが承認した清掃剤／消毒剤にて表面の拭清掃を行います。

- ・表面とクッションの消毒
- ・ユーザーインターフェース（タッチパネル）の消毒
- ・インスツルメント類の手入れ、消毒/ 滅菌
- ・アベックスロケーター部品の洗浄と消毒/ 滅菌
- ・インスツルメントホルダーの消毒
- ・ハンドルの消毒
- ・トレイの消毒
- ・バキュームホース洗浄用コネクタの消毒
- ・无影灯のメンテナンスと清掃

消毒

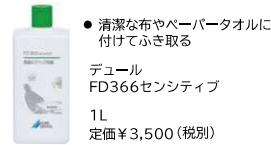


- 清潔な布やペーパータオルに付けてふき取る

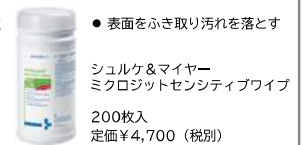

- 表面をふき取り汚れを落とす


清掃

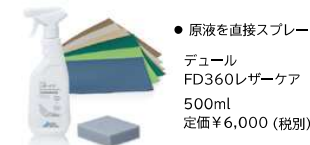

- 原液を直接スプレーし布でふき取る

⚠ FD360付属の清掃用スポンジは、外来待合室のソファ等には使用しないでください。


⚠ FD360は、アームレストやダブルアーティキュレーティングヘッドレストのクロムメッキ面には使用しないでください。変色するおそれがあります。

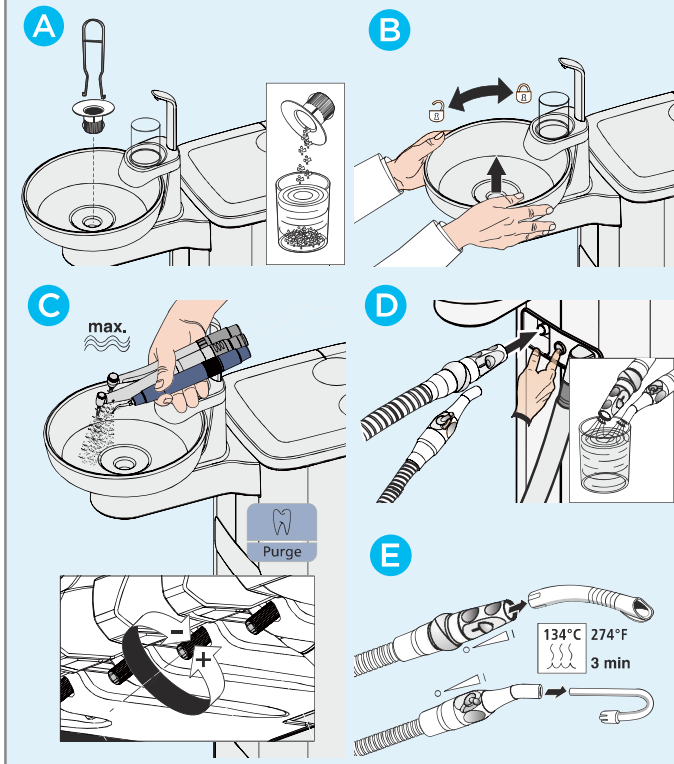

水回路とバキューム装置の清掃／消毒

- A スピットンのトラップを清掃します。
- B スピットンをデンツプライシロナ承認の洗浄剤で清掃します。
- C 使用したインスツルメントのパージ（水の入替え）を水量を最大に行います。
裏面： **C** の項目参照
- D バキュームホース、ハイダホースの洗浄を行います。
※洗浄機能が付いていない場合にはコップ1杯の水を吸引させます。
裏面： **D** の項目参照
- E バキュームハンドピースを滅菌します。
各チップを滅菌されたものと交換します。

B 清掃剤

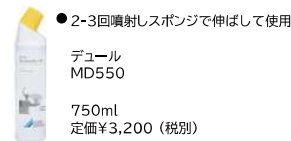



- 2-3回噴射しスポンジで伸ばして使用

C

パージ機能

使用したインスツルメントを一度にフラッシングする機能。
設定した時間だけフラッシングされます。

イージーパッド用

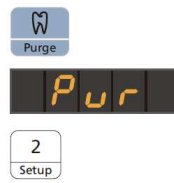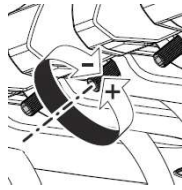

Setupキーを押し◀▶からパージ (Pu) を表示。
◀▶を使用して時間を設定し
Setupキーを押し確定しま
す。20秒以上で設定してく
ださい。

上図キーを押し1分以上
水を流してスピットン
を洗浄します。




インスツルメントホルダー
下にある水量調節を左に回
し注水量を最大にします。

Purgeキーを押し、次に
Setupキーを押します。

インスツルメントを
スピットン上に保持
し排水を行います。
※設定した時間、排
水されます。

続いてシリンジを
スピットン上に保
持し、ウォーター
キーを20秒以上押
して排水します。

イージータッチ用

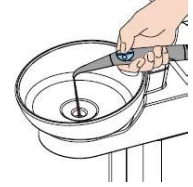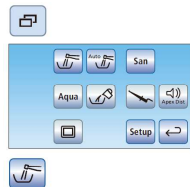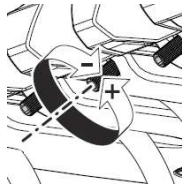

上図キーを押し1分以上
水を流してスピットン
を洗浄します。

インスツルメントホルダー
下にある水量調節を左に回
し注水量を最大にします。

パージ機能キーを押します。

一十キーを使用し20秒以上の
時間を設定したのち、スター
トキーを押しパージをスター
トさせます。

インスツルメントを
スピットン上に保持
し排水を行います。
※設定した時間、排
水されます。

続いてシリンジを
スピットン上に保
持し、ウォーター
キーを20秒以上押
して排水します。

Tips

ハンドピースの適性注水量の調整位置

パージ・オートパージ・サニテーションなどの排水機能を使用時は、注水量を最大にする必要があります。
また、患者さんに安全な治療を提供するためには、最低注水量を守る必要があります。



シリンジ
130ml/分(固定)



タービン
最低：50ml/分以上
最大：160ml/分



コントラ
最低：50ml/分以上
最大：120ml/分



超音波スケーラー
最低：30ml/分以上
最大：60ml

D

バキュームホースの洗浄


バキュームシステムは、細菌を含んだ分泌物、唾液、血液を吸引します。
そのため、衛生上の理由から定期的な洗浄が必須です。

洗浄機能が付いていない場合




コップ1杯の水を吸引し
てください。

洗浄機能が付いている場合

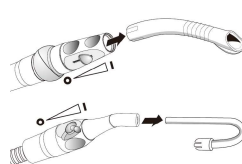

チップを取り外し、洗浄する
ホースの吸引フローを最大に
スライドします。洗浄しない
ホースは最小に設定します。

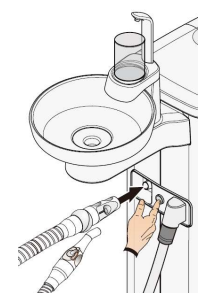

洗浄するホースを差し込み、
ボタンを押してスタートします。
吸引音が聞こえると洗浄は終
了です。