
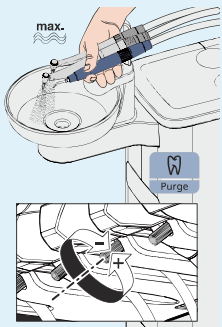


Intego

診療前に行うメンテナンス

詳細については取扱説明書の「5 診療チームによるお手入れ、清掃、メンテナンス」をご参照ください。


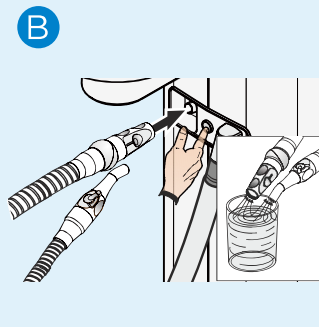



給水ラインの洗浄とバキュームホースの洗浄

A インstrumentホースのパージ(水の入替え)を水量を最大に行います。
患者さんごとに行うメンテナンス裏面: **C** の項目参照

B バキュームホース、ハイダホースの洗浄を行います。
※洗浄機能が付いていない場合にはコップ1杯の水を吸引させます。
患者さんごとに行うメンテナンス裏面: **D** の項目参照




診療後に行うメンテナンス

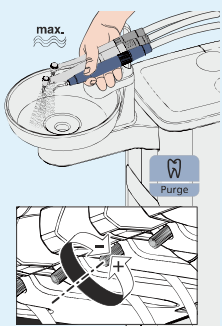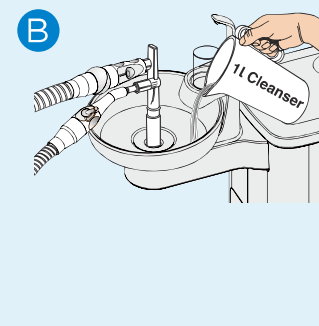給水ラインの洗浄とバキュームホースの洗浄

A 終業時の水回路内水の入替え(パージ)
始業時と同様に診療終了後パージを行います。
120秒以上排水してください。

B バキュームホースを午前の診療終了後と1日の診療終了後に洗浄アダプタを使用して洗浄してください。
裏面: **B** の項目参照




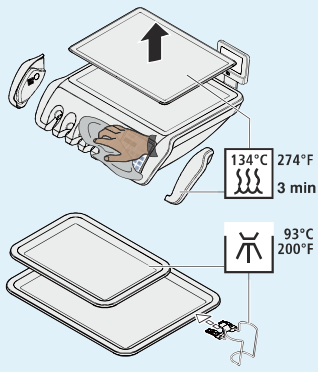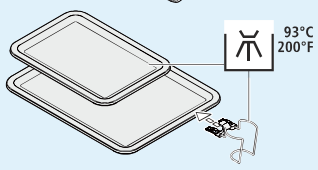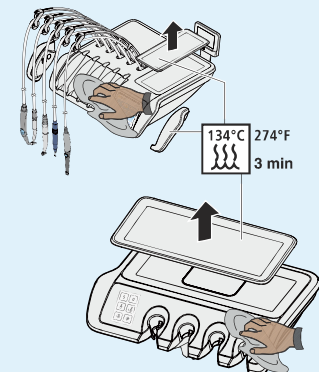

トレー用シリコンマットの滅菌 ユニットハンドルカバーの熱消毒 インスツルメントハンガーの消毒

シリコンマットの滅菌
ユニットトレー用シリコンマットはオートクレーブ滅菌が可能です。

ユニットハンドルカバーの熱消毒
取り外し可能なユニットハンドルカバーは93°Cで熱水消毒が可能です。

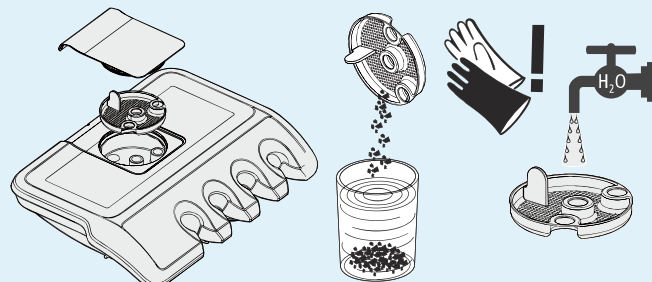インスツルメントハンガーの消毒
消毒剤を使用して拭清掃を行います。



バキュームフィルターの清掃

○ アシスタントユニットのバキュームフィルター清掃を行います。

B

給水ラインの洗浄とバキュームホースの洗浄

頻度：午前診療後1回、午後診療後1回


バキュームシステムは、細菌を含んだ分泌物、唾液、血液を吸引します。そのため、衛生上の理由から定期的な洗浄が必須です。



●50倍に希釈しバキュームより吸引し使用
シュルゲ&マイヤー
アスピロマッチック
2L
定価 ¥6,950 (税別)





●50倍に希釈しバキュームより吸引し使用
デュール
オロトルプラス
2.5L
定価 ¥12,000 (税別)

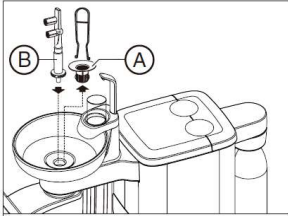

<洗浄の準備>


1. トラップ(A)を取り外します。
2. スピットンボールを清掃します。
3. 洗浄用アダプタ(B)をしっかり挿入します。
4. バキュームチップをバキュームホースから取り外します。
5. バキュームハンドピースの吸引フローを最大に設定します。
6. アダプタ(C)を排唾管に取り付けます。

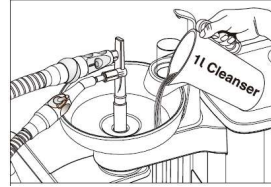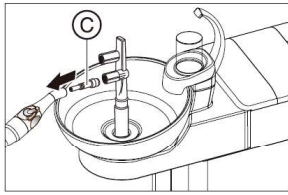

<洗浄の手順>

1. スピットンボールに1リットルの洗浄液を入れます。
2. バキュームホースと排唾ホースを洗浄用アダプターに取り付けます。
3. 洗浄液の3分の2がバキュームホース内に吸引され、3分の1がスピットンボールの排水管に流れ込みます。
4. 洗浄液をしばらく放置して反応させます。

放置（暴露）時間の目安：
アスピロマッチック：30分以上
オロトルプラス：60分以上

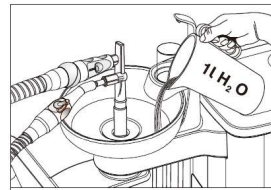

<洗浄剤のすぎ>

1. 洗浄処理後、スピットンボールに1リットル以上の水を入れます。
2. 水を吸引させます。
3. 吸引処理終了後、ホースを取り外します。