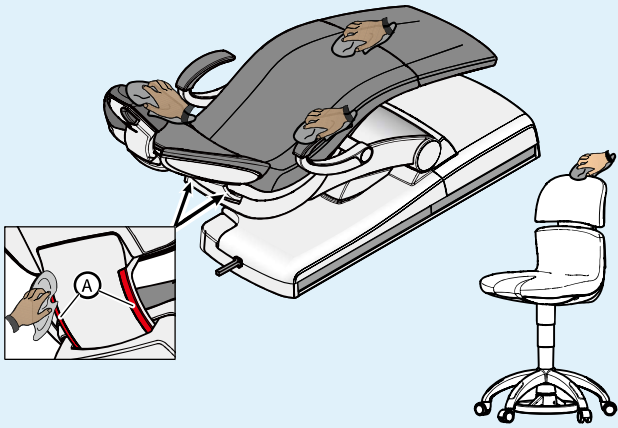
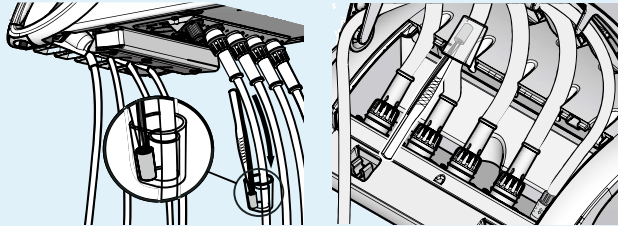
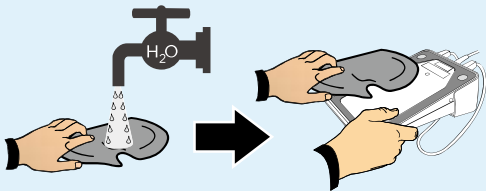
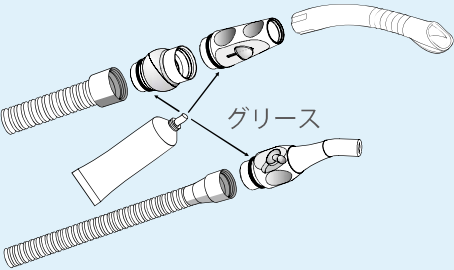


Intego


週ごとに行うユニットのお手入れ

詳細については取扱説明書の「5 診療チームによるお手入れ、清掃、メンテナンス」をご参照ください。


	<h3>シートクッションの清掃とケア</h3> <ul style="list-style-type: none">デンツプライシロナが承認した清掃剤にて表面の拭清掃を行います。<ul style="list-style-type: none">A部分は水で湿らせた布で拭いてください。 <p>消毒</p> <ul style="list-style-type: none">清潔な布やペーパータオルに付けてふき取るデュール FD366センシティブ 1L 定価¥3,500 (税別)表面をふき取り汚れを落とすシュルケ&マイヤー ミクロジットセンシティブワイブ 200枚入 定価¥4,700 (税別) <p>清掃</p> <ul style="list-style-type: none">原液を直接スプレーし布でふき取るデュール FD360レザークア 500ml 定価¥6,000 (税別) <p>⚠️ FD360は、アームレストやダブルアーティキュレーティング型ヘッドレストのクロムメッキ面には使用しないでください。変色するおそれがあります。</p> <p>⚠️ FD360付属の清掃用スポンジは、外来待合室のソファには使用しないでください。</p>
 <p>TS ドクターユニット CS ドクターユニット A</p>	<h3>タービンホースのコットンロール交換</h3> <ul style="list-style-type: none">タービンホースのコットンロールを交換します。ドリップ容器をスライドさせ、コットンロールを新しいものに取り換えたのち、ドリップ容器を元に戻します。CSドクターユニットの場合は裏面 A をご参照ください。
	<h3>フットコントローラーの清掃</h3> <ul style="list-style-type: none">水で湿らせた布でフットコントローラーの下側を拭いてください。
 <p>グリース</p>	<h3>バキュームハンドピースへのグリース塗布</h3> <ul style="list-style-type: none">熱消毒または滅菌後、および毎週一回バキュームハンドピースを取り外し、Oリングにグリースを塗布してください。 <p>デンツプライシロナ TCメンテナンスグリース7g 7g 定価¥1,450</p>

A


CSドクターユニットのコットンロール交換

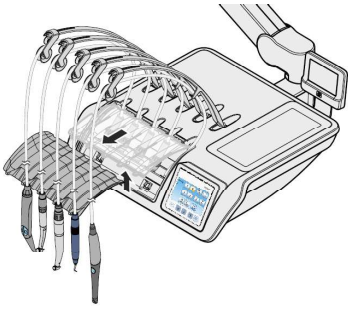

1. 各インスツルメントを手前に引き出し、インスツルメントホルダーを取り外します。

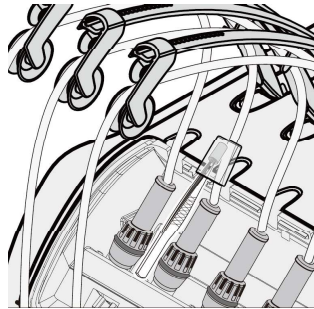

2. ドリップ容器をスライドさせ、コットンロールを交換した後、元に戻します。

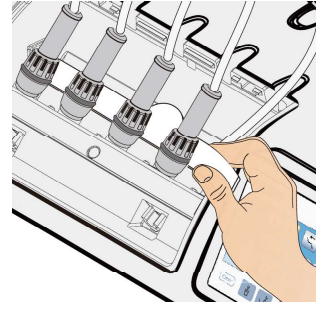

3. インスツルメント接続部の下にあるオイルキャッチャーを引き出し交換します。