

Компания Dentsply  
DeTrey GmbH  
Де-Трей-Стр. 1  
78467 Констанц  
Германия  
[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

© 2016 Dentsply Sirona

### Нанесение

Нанесите **Prime&Bond universal™** на все поверхности полости. Избегайте большого скопления адгезива.

Распределяйте адгезив по поверхности легкими втирающими движениями в течение 20 секунд

Обработайте всю поверхность умеренным потоком воздуха в течение не менее 5 секунд до формирования блестящего, однородного слоя.

### Светоотверждение

$\geq 500 \text{ мВт/см}^2 = 20 \text{ сек}$   
 $\geq 800 \text{ мВт/см}^2 = 10 \text{ сек}$

# Prime&Bond universal™

## Универсальный адгезив

		
<b>20 сек</b> Втирайте лёгкими движениями	<b>5 сек</b> Удалите растворитель	<b>Полимеризация</b> $\geq 500 \text{ мВт/см}^2$ : 20 сек $\geq 800 \text{ мВт/см}^2$ : 10 сек



Осторожно!  
См. инструкцию по применению




K106683-00

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

 **Dentsply  
Sirona**

## Пошаговая инструкция

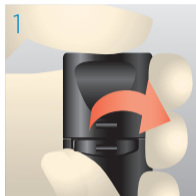


### Подготовка

Снимите индикатор вскрытия защитного колпачка.



Флакон с крышкой можно открыть и закрыть одной рукой. Не откручивайте крышку.

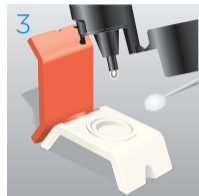

Внесите 1-2 капли адгезива в палетку CliXdish™.



В закрытой палетке CliXdish™ адгезив **Prime&Bond universal™** остается пригодным для использования в течение 30 минут.



Чтобы закрыть флакон, надавите на крышку до упора, пока не ощутите «щелчок».



### Чистка и дезинфекция

Раскройте CliXdish™ для обработки. Очистите дозатор с помощью мягкой бумажной салфетки.

## НЕОБЯЗАТЕЛЬНО



### Протравливание

Начните травление по краям эмали.



Продолжайте протравливать дентин.



### Промывка

Удалите гель и промойте водой.



Удалите лишнюю воду.

**Не пересушивайте!**