

弊社滅菌器DAC ユニバーサルまたはDAC プロフェッショナルへの脱塩水を自動的に供給する「ニトラデム」につきまして、未使用時に水道からの水圧が長時間かかることによる万が一の水漏れを防ぐため、**日常の診療終了時には必ずニトラデムの機能をオフにし、水道の元栓を閉めていただきますようお願いいたします。**機能停止方法については下記、またはお手元の取扱説明書(パウチ)をご参照ください。


■ ニトラデム・ダイレクトコネク1 (パネル英語表示) の場合

- 1 本体右端のPower Supplyより電源コネクターを抜きます。
- 2 本体横にあるコックを水平(右記図2 矢印)に回し水道水の供給を止めます。
- 3 最後にニトラデムに供給している水道の元栓を閉めます。




■ ニトラデム・ダイレクトコネク2 (パネル日本語表示) の場合

- 1 本体左側にある電源スイッチをオフにします。
- 2 電源スイッチの下にあるコックを水平(右記図2 矢印)になるまで回し水道水の供給を止めます。
- 3 最後にニトラデムに供給している水道の元栓を閉めます。

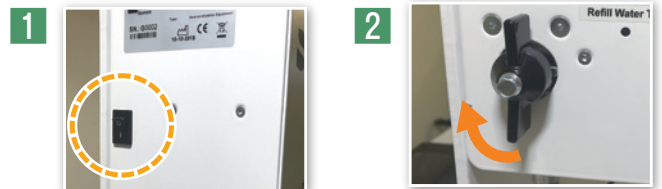

■ ニトラデムEAの場合

- 1 本体右端のPower Supplyより電源コネクターを抜きます。
- 2 本体横にあるコックを引き、左回り(右記図2 矢印)に最後まで回します。その後、排水チューブの止水弁をあげて残留水を排出し、止水弁を閉めます。
- 3 最後にニトラデムに供給している水道の元栓を閉めます。

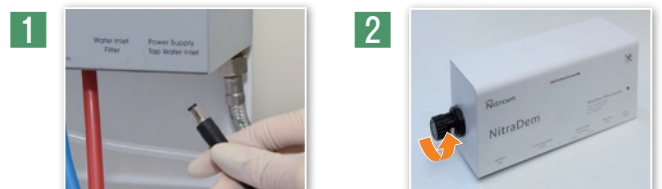

★ 診療再開時

- 1 診療再開初日に各ニトラデムを再稼働する際は、上記と逆の手順を行ってください。
- 2 再稼働後、ニトラデムのランプがオレンジまたは赤になっている場合はランプが青になるまで止水弁を開け、休診中に劣化した残留水を排出してください。



■ 滅菌器内部の排水

長期休眼中に給水タンク内の水質が劣化する恐れがあるため、DACユニバーサル、プロフェッショナル共に取説あるいは簡易マニュアルに従って、休診日前日に給水タンク内の水を排水してください。

ご参考:製品上のシール記載事項

注意! 夜間、週末、休日の前は、必ず水道の元栓を閉め、給水口バルブを「オフ」にし、電源コードを抜いてください。
ニトラデム・ダイレクトコネク: 右側のタップを水平にします。
ニトラデムEA: 左側ツマミを引き、後ろへ回してから押し込みます。