

품목허가번호	수허 03-1609 호
품목명	근관충전용재료
모델명	AH Plus
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY DeTrey GmbH (독일)
사용목적	근관 충전 시 사용하는 재료
중량 또는 포장단위	Package
<p>사용방법</p> <p>가. 사용 전 준비사항</p> <ul style="list-style-type: none"> -근관소제 -유효기간과 포장상태를 확인할 것 <p>나. 사용방법</p> <p>① 혼합: Metal spatula 를 이용하여 믹싱패드 또는 glass slab 에 동량의 페이스트 A, B 를 단색이 될 때까지 혼합한다.</p> <p>주의) 사용 후 뚜껑을 흔들리지 말 것. 유색 뚜껑은 유색 튜브에, 흰색 뚜껑은 흰색 튜브에 일치시킨다.</p> <p>② 충전: 일반적인 사용법대로 AH Plus 는 거타퍼차, 실버 또는 티타늄 근관 포인트와 함께 사용한다.</p> <p>혼합된 AH Plus 를 Lentulo Spiral 위에 적용한다.</p> <p>매우 느린 속도에서 Lentulo Spiral 을 근침부터 서서히 충전함으로써 근관에 과다충전과 거품이 일어나는 현상을 피하도록 한다.</p> <p>느린 속도에서 Lentulo Spiral 을 천천히 빼낸다.</p> <p>대안으로는 reamer 를 함께 사용할 수도 있다. 근침 형성 시에 마지막으로 사용했던 크기의 reamer 를 사용하면 된다.</p> <p>거타퍼차 포인트와 측방 또는 수직 충전 방법으로도 가능하며 이런 경우에는 약간의 AH Plus 를 도포한다.</p> <p>만약 AH Plus 가 거타퍼차 포인트와 함께 사용되었다면 근관 충전재는 거타퍼차 제거를 위해 일반적인 기법대로 제거하면 된다.</p> <p>③ 작업시간: 혼합 시부터 충전 완료시까지 총 작업시간은 4 시간이다.</p> <p>④ 경화시간: 섭씨 37 도에서 경화시간은 최소 8 시간이다.</p> <p>다. 사용 후 보관 및 관리방법</p> <ul style="list-style-type: none"> -만약 거타퍼차 포인트와 함께 사용되었다면 재래식 용액으로 제거가 가능하다. -사용된 도구는 즉시 알코올이나 아세톤으로 세척한다. <p>사용 시 주의사항</p> <p>가. 사용 시 주의사항</p> <p>에폭시 레진과 아민은 피부 접촉 시 지각과민을 유발하므로 주의할 것</p>	

피부에 접촉 시 깨끗이 씻어낼 것
 삼켰을 때는 충분한 물을 마시고 난 뒤 의사의 진료를 받을 것
 유효기간이 지난 제품은 사용하지 말 것

나. 부작용/경고/금기사항

에폭시 레진과 아민은 피부 접촉 시 지각 과민을 유발
 경화되지 않은 페이스트가 구강 내 점막층과 접촉 시 염증 발생

다. 유효기간

제조일로부터 18 개월

라. 저장방법

사용 후 밀봉할 것

사용된 도구는 세척 후 보관

상온 25°C 이하에서 보관한다.

첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	상온 25°C 이하에서 보관한다.
유효기간	제조일로부터 18 개월
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월, 사용기한	제조자 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	