

품목허가번호	수허 03-519호
품목명	치과주조용비귀금속합금
모델명	Deckgold
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	DeguDent GmbH (독일)
사용목적	금관등의 수복물을 제작
중량 또는 포장단위	Powder : 3g/bottle, Liquid : 20ml/bottle
<b>사용방법</b> (1) 세라믹 물질로 저장될 부위에는 노말형 Deck-Gold로, 전장되지 않을 부위는 Fine형 Deck-Gold로 메탈 프레임 Work를 전부 코팅한다. (2) 혹은 산화 알루미늄으로 프레임 Work를 Blast하고 흐르는 물에 씻어낸다. (3) 에틸아세테이트로 잘 칠해준다. (4) 세라믹 물질과 메탈의 전이에 노말형 Deck-Gold를 바른다. (5) Deck-Gold 소성 후에도 프레임 Work를 소환로 속에 3분 정도 더 넣어둔다. 그래도 변색이 되면 은함유 세라믹 알로이 사용할 때의 세라믹 물질의 황록 변색을 제거한다. 매 소성이 끝날 때마다 세라믹제 스톤이나 다이아몬드 그라인딩 기구를 사용해서 세라믹 물질 뒤의 변색된 부분을 그라인딩하고 산화 알루미늄으로 blast한다. 그리고 흐르는 물에 잘 씻어낸다.	
<b>사용 시 주의사항</b> (1) 치과용 합금 작업 시 먼지, 연무의 발생을 피하도록 주의한다. (2) 먼지와 연무로부터 보호하기 위해 적절한 흡입기구 등이 사용되어야 한다. (3) 은함유 세라믹 알로이 사용할 때 세라믹 물질의 황록 변색을 제거할 때 브릿지 프레임 Work 비전장 부분의 산화막을 가능하면 손상시키지 않아서 변색을 막는 격리 역할을 할 수 있다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	실온의 습기가 적은 곳에서 보관한다.
유효기간	제조일로부터 2년
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	