

품목허가번호	수허 10-505 호
품목명	고형근관충전재
모델명	제조자표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Dental(TianJin) Co., Ltd. (중국)
사용목적	근관 치료 후 근관 충전용으로 사용
중량 또는 포장단위	120 개(20points x 6)
사용방법 가. 사용 전 준비사항 근관을 형성한다. 해부학적 근관보다 크라운 측으로 0.5mm 이상 형성한다. 나. 사용방법 1. 의사는 환자의 근관 너비를 기반으로 알맞은 거타퍼차를 선택한다. 2. 거타퍼차는 소독을 위해 75% 에탄올에 담구거나 근관소독, 사용 후 멸균하고 건조, 가열소독을 피하는 것을 기반으로 멸균한다. 3. 처음 근관은 산화아연유지놀 페이스트를 채우고 나서 근관에 멸균된 거타퍼차를 사용한다. 4. 근관충전 후 과량의 거타퍼차는 뜨겁게 달군 기구로 즉시 밀봉, 제거한다.	
사용 시 주의사항 1. 알레르기 피부염의 병력이 있는 환자는 본 제품의 사용을 금한다. 2. 비를 막을 수 있는 공간에서 직사광선을 피하고 충격을 견디고 독성의 냄새와 부식성이 있는 곳은 피한다. 3. 제품을 사용하기 전에 사용방법을 주의깊게 읽을 것.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	30°C이하에서 환기가 되는 건조하고 어두운 곳에 보관한다.
유효기간	제조일로부터 4년
제조번호	LOT 번호
제조연월	제조자 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	