

품목허가번호	수허 13-1766 호
품목명	고형근관충전재
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	DENTSPLY Dental(TianJin) Co., Ltd. (중국)
제조의뢰자(제조의뢰국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	열대성 나무의 수액을 응고시킨 것으로서 치근관을 충전하는 데에 사용한다. 가열하여 부드럽게 한 후 근관에 삽입한다.
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법:</b> 근관을 형성한다. 형성된 근관을 소독하고 건조시킨다. 알맞은 크기의 거타-퍼차를 준비한다. 거타-퍼차를 수직 또는 측방가압 충전법으로 근관을 충전한다.	
<b>사용 시 주의사항:</b> 근관충전 후 과량의 거타-퍼차는 뜨겁게 달군 기구로 즉시 제거한다. 근관의 크기에 맞게 사용한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	공기나 열에 노출되지 않게 건냉소나 냉장고에 보관.
유효기간	4 년
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	