

품목허가번호	수허 13-1771 호
품목명	치과가공용합금
모델명	제조원표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	DeguDent GmbH (독일)
사용목적	치과용으로 사용하는 순금속
중량 또는 포장단위	Package
<p><b>사용방법</b></p> <p>가. 사용 전 준비사항 제품의 유효기간이 유통기간 내에 있는지 확인하고 포장이나 제품에 손상이 있는지 확인한 후 유효기간이 경과했거나 손상이 있는 것은 사용하지 않는다.</p> <p>나. 사용방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 비시안 아황산금 용액과 활성용액을 20:1 비율로 혼합한다. (예: 금용액 100ml 에 활성용액 5ml 첨가)</li> <li>2. 용액의 양은 전기분해가 될 치아의 크기에 따라 결정되며 층의 두께 및 파워세팅은 파라미터 결정을 위한 Solaris model 을 사용하여 세팅되고 Solaris Unit 은 자동으로 필요한 용액의 양을 산출한다.</li> <li>3. 진행촉진의 품질은 금용액과 활성용액을 정확한 용량으로 혼합하고 도금기기를 정확한 파워로 세팅하는 것에 따라 달라진다.</li> <li>4. 용량이 결정되면 장비의 용기에 금용액과 활성용액을 혼합하여 넣고 파워를 세팅하여 도금을 시작한다.</li> </ol> <p>다. 사용 후 보관 및 관리방법</p> <p>오염을 피하고 직사광선 및 산소에 오랫동안 노출되는 것을 피한다. 사용 후에 뚜껑을 조심스럽게 닫는다. 시원하고 어두운 곳, 특히 화학약품용 보관장어의 보관이 권장된다. 폐기 시에는 관련법과 규정에 의거하여 버린다.</p> <p><b>사용 시 주의사항</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solaris 금용액은 일회 사용하여야 하고 Solaris Activator 원 제품하고만 사용하여야 한다.</li> <li>2. Solaris 금용액은 표면과 옷 등을 오염시키거나 착색시킬 수 있으므로 다룰 때 적절한 주의가 필요하다.</li> <li>3. Solaris activator 의 각 사용 전에는 잘 흔들고 결정체가 형성되었는지 확인하고 사용하지 말아야 한다.</li> <li>4. Solaris activator 는 흡입하거나 삼키는 경우에 유해하다.</li> <li>5. Solaris activator 는 단단하게 뚜껑을 닫고 통풍이 잘 되는 곳에 보관한다.</li> <li>6. Solaris activator 가 눈에 접촉될 경우 다량의 물로 즉시 씻어내고 전문의료인의 조언을 구한다.</li> <li>7. Solaris activator 사용 시 적절한 보호 의복과 장갑, 안/안면 보호대를 착용한다.</li> </ol>	

8. 느낌이 좋지 않거나 사고가 있을 경우 즉시 전문의료인의 조언을 구한다.

첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	시원하고 어두운 곳에 보관한다.
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	