

품목허가번호	수허 98-1071호
품목명	심미수복용복합레진
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Caulk (미국)
사용목적	Class I & II의 구치부 수복용
중량 또는 포장단위	Package
<b>사용방법</b> 가. 사용 전 준비사항 -색조선택 및 용량선택 -와동부위 소제 나. 사용방법 (1) 와동형성 모든 치아 와동의 경우 본 작업 시 최소한의 우식부분 제거를 유지하도록 한다. 수복이 고 치환력을 받게 될 때를 제외하고는 기계적 유지력을 위한 와동형성은 할 필요가 없다. (2) 수분조절 와동 표면에 소제는 결합력에 매우 중요한 요소이며, 치아 표면의 타액, 혈액, 그리고 잉여의 수분을 제거한다. (3) 치수보호 상아질이 1mm 미만으로 치수와 근접한 깊은 와동의 수복 시에는 다이칼과 같은 칼슘 하이드록사이드를 도포한다. 단, 상아질이 1mm 이상으로 치수와 거리가 있는 얇은 와동의 경우에는 칼슘 하이드록사이드를 사용할 필요가 없다. (4) 매트릭스의 사용 해부학적 형태와 물질 낭비를 최소화하기 위해서 매트릭스를 사용함으로써, 치아 인접면의 접촉과 외형을 증진시킬 수 있다. (5) 치아에칭 본딩재 사용 전, Tooth Conditioner Gel을 사용하여 에칭함으로써 결합력을 증진시킬 수 있다. 에칭제 도포 후 곧 흡입기나 스프레이로써 에칭된 표면을 세척한다. (6) 본딩재 사용 본딩재 2~3방울 정도를 브러쉬에 적용한 후 치아 표면에 도포 후 20초 정도 유지시킨다. 초과된 용액은 치과용 시린지를 이용하여 5초 동안 제거한다. 표면에 광택이 날 때까지 2~3회 반복한다. 10초 동안 본딩재를 광중합한다. 이차로 본딩재를 치아 표면에 도포한 후 과도한 용액은 에어 시린지로 불어 날린다. (7) Surefil 적용 아말감 캐리어에 surefil의 적량을 취한 후 와동부위에 적용한다. 아말감 충전기로 중앙부위부터 충전한다. 약 0.1mm정도 높게 충분히 충전을 해준다.	

(8) 광중합

광중합기로 40초간 충전재를 광중합한다.

(9) 피니싱&폴리싱

광중합 후 즉시 초과된 부위를 제거하고, 피니싱 & 폴리싱 기구를 사용하여 마무리한다.

**사용 시 주의사항**

(1) 치과용으로 사용할 것

(2) 본딩재는 인화성 물질이므로 화기로부터 멀리할 것

(3) 액이 피부에 접촉 시 깨끗이 씻어낼 것

(4) Methacrylate 알레르기 환자에게는 사용하지 말 것

<b>첨부분서의 작성 및 개정연월</b>	2024.10
<b>보관 또는 저장방법</b>	실온(약25°C)에서 환기가 잘되는 곳에서 차광 보관한다.
<b>유효기간</b>	제조일로부터 3년
<b>제조번호</b>	LOT번호 참조
<b>제조연월, 사용기한</b>	제조사 표시사항 참조
<b>부작용 보고 관련 문의처</b>	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	