

품목허가번호	수허 98-1163 호
품목명	치과용시멘트
모델명	제조자표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Caulk (미국)
사용목적	크라운, 브릿지, 인레이, 교정용 브라켓의 접착용 PFM 크라운과 포세린의 마진 접착용
중량 또는 포장단위	분말 1 병: 12g, 액 1 병: 6g
사용방법 가. 사용 전 준비사항 형성물 준비 와동 형성 나. 사용방법 형성물 준비: 형성물을 청결한 상태로 유지한다. 치수도포: 치수와 밀접한 부위에는 다이칼과 같은 칼슘 하이드록사이드를 도포 시멘트혼합: 분말을 흔든 다음 2 스푼(약 0.25g)을 믹싱패드 위에 놓고 액이 든 병을 거꾸로 들고 2 방울(약 0.12g)을 분말 위에 투여한 후 스파툴라를 이용해 혼합한다. 혼합: 약 30 초간 용도에 맞는 점도가 유지되도록 혼합한다. 작업시간: 혼합 후 작업시간은 약 4 분 정도이며 믹싱패드 위에 있을 경우는 일반적으로 10 분 또는 그 이상의 시간이 경과한 후 경화된다. 경화시간: 구강 내의 조건에서 일반적으로 3 분 정도의 시간에 경화된다. 피니싱: 구강 내에서 약 1-2 분 경과 후 젤 상태로 1 차 변화하며 이 때 초과된 양을 제거한다. 이보다 오랜 시간이 경과할 경우 경화가 완료되면 제거하기가 매우 힘들어지므로 젤 상태에서 제거하도록 한다. 다. 사용 후 보관방법 25°C 이하에서 보관할 것. 사용 후 반드시 밀봉할 것. 직사광선을 피할 것. 냉동시키지 말 것.	
사용 시 주의사항 치과용으로 사용할 것. 분말 시여 시 충분히 흔들어 줄 것. 액이 피부에 접촉하면 깨끗이 씻어낼 것.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	사용 후 밀봉할 것. 실내 온도에서 보관할 것.
유효기간	제조일로부터 3년
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월, 사용기한	제조자 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	