

품목허가번호	수허 98-600호
품목명	치과용인상재료
모델명	Regisil Cartridge System
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Caulk (미국)
사용목적	교합 인상채득용
중량 또는 포장단위	Base : 50ml×2 Cartridge, Catalyst : 50ml×2 Cartridge/ Package
사용방법 가. 사용 전 준비사항 - 인상채득 부위를 깨끗이 한다. - 인상 적용건의 조립 나. 사용방법 - 카트리지 장착: 조립된 디스펜스에 카트리지를 조립한다. - 인상재 투여: 디스펜스의 방아쇠를 당기면 베이스와 카탈리스트가 믹싱팁을 통해서 혼합되어 인상채득 부위에 투여된다. - 작업시간 및 경화시간: 22°C에서 작업시간은 30~60초 이며, 경화시간은 1분이다. 온도의 상승은 작업, 경화시간을 단축시킬 수 있다. - 트레이 사용: 트레이 사용이 필요하다면, 트레이의 양면에 2~3mm 정도의 양을 투여 후 구강내 교합을 채득한다. - 인상재 제거: 믹싱 시작 후 1분30초경에 구강내에서 채득된 인상을 제거한다. - 피니싱: 초과된 양은 특히 인접면의 초과된 양은 정확한 모델 형성에 영향을 미치므로 제거한다. 다. 사용 후 보관방법 카트리지를 믹싱 팁에서 분리, 밀봉하여 18~25°C에서 보관한다.	
사용 시 주의사항 - 치과용으로 사용할 것 - 인화물질과는 멀리할 것 - 눈에 접촉하지 않도록 할 것 - 사용 후 베이스와 카탈리스트가 접촉하지 않도록 주의한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	실온보관
유효기간	제조일로부터 2년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

www.dentsplysirona.com