

품목허가번호	수인 98-603호
품목명	의치상용레진
모델명	Lucitone 199 Denture Base
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조사(제조국)	DENTSPLY Caulk (미국)
제조의뢰자(제조의뢰국)	DENTSPLY LLC (미국)
사용목적	의치상용 레진
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함

#### 사용방법

##### 1) 사용 전 준비사항

인공치의 왁스제거: 왁스 작업을 마친 후, 끓는 물에서 약 6분 동안 왁스를 제거한다. 왁스 제거 시 용해 액을 사용하지 말 것이며, 왁스와 기름 분을 완전히 제거한다.

##### 2) 사용방법

① 혼합: 분말이 덩어리지는 것을 방지하고, 올바른 색을 얻기 위해 분말 병을 흔들어준다.

원칙적으로 본 제품에는 치아 에칭을 할 필요는 없다.

분말과 액의 비율을 21g : 10ml로 해서 혼합한다.

케이스 별 혼합 비율은 아래 표를 참조한다.

Case	분말	액
Extra Large	42cc	13ml
Large	32cc	10ml
Average	26cc	8ml
Partial	19cc	6ml

② 적용: 레진 혼합 분을 따뜻한 플라스크 내에 있는 몰드에 일정한 압력으로 약간 초과될 정도의 양을 적용한다.

③ 플라스크 장착: 플라스크를 죄어서 초과된 양을 제거한다.

④ 중합: 닫혀진 플라스크를 1시간 30분 동안 73±2°C의 물 속에 둔 다음 30분 동안 끓인다.

⑤ 냉각: 실내에서 30분 동안 플라스크를 냉각한 다음, 플라스크를 열기 전에 약 15분 동안 차가운 물에 침수시킨다.

⑥ 리 라이닝: 필요 시에는 본 제품, 또는 다른 자가 중합 레진을 이용해서 리 라이닝 한다.

##### 3) 사용 후 보관방법

24°C 이하에서 보관한다.

분말응고 방지를 위해 뒤집어서 보관한다.

#### 사용 시 주의사항

1) 피부 접촉에 주의하고, 지각 과민 발생시 사용을 중단할 것

2) 증기 흡입이나 섭취를 금할 것

3) 작업장의 통풍상태를 양호하게 하고, 마스크 및 보호장갑을 착용한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2025.01
보관 또는 저장방법	24°C이하에서 보관한다. 수분이나 직사광선을 피할 것. 액은 발화물질을 포함하므로 인화물질과는 분리 할 것.
유효기간	제조일로부터 5년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	