

품목허가번호	수허 99-46호
품목명	5세대상아질접착시스템
모델명	606.67.275
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY DeTrey GmbH (독일)
사용목적	Composite Resin, Compomer 접착용 민감한 치경부 부위의 보호적 와니스 아말감 수복전의 와동와니스
중량 또는 포장단위	3.5ml/bottle
<b>사용방법</b> 1) 사용 전 준비사항 치아에칭 또는 치아소제 2) 사용방법 ① 깨끗한 적용 팁 등으로 원하는 부위에 적용한다. ② 적용 후 치아부위를 20초간 유지한다. ③ 5초 정도 치과용 에어 시린지로 용제를 제거한다. 용제 제거 후 표면은 균일하고 광택을 띄게된다. ④ 와동 부위를 골고루 10초간 광중합기로 광 조사한다. ⑤ 광중합 후 바로 수복물을 적용한다. 3) 사용 후 보관 및 관리방법 (1) 사용 후 바로 마개는 잘 닫아서 24°C이하에서 차광 보관한다. (2) 인화성이 강한 아세톤을 포함하므로 화기에 주의한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> (1) 치과용으로 사용할 것 (2) 본딩제는 인화성물질이므로 화기로부터 멀리할 것 (3) Eugenol을 함유한 물질과는 함께 사용하지 말 것 (4) 과산화수소수는 레진의 경화를 방해하므로 본딩제 적용 전에는 사용을 금한다. (5) 아세톤을 함유한 물질과는 장기간, 그리고 강렬한 접촉을 피할 것 <b>사용금지</b> -직, 간접적인 치수 도포 -치수와 가까운 상아질 부위의 도포	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	24°C이하에서 통풍이 잘되는 곳에서 차광 보관한다.
유효기간	제조일로부터 2년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조자 표시사항 참조

부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

본 제품은 의료기기임



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)