

품목허가번호	수인 01-807호
품목명	치과용알지네이트인상재
모델명	22C.500R103.1P 외 1건
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Dental(TianJin) Co. Ltd (중국)
사용목적	치아 또는 치은의 인상
중량 또는 포장단위	Package
<b>사용방법</b> 가. 사용 전 준비사항 환자의 구강소제  나. 사용방법 (1) 분말시여: 뭉침 방지를 위해 봉지를 흔들여 준 다음 적량을 채취한다. (2) 혼합: 분말과 물을 3:1 비율로 혼합한다. (3) 장착: 혼합물을 트레이에 투여 후 인상채득 부위에 트레이를 장착한다. 2~2분 30초후 경화되면 구강 내에서 트레이를 제거한다. (4) 소제: 구강에서 제거된 트레이를 흐르는 물에 깨끗이 소제한다. (5) 주의: 추가 인상재 투입이 필요하면, 축축한 타월로 감싸둔다.  다. 사용 후 보관 및 관리방법 : 상온 25°C이하에서보관한다.	
<b>사용시 주의 사항</b> (1) 치과용으로 사용할 것 (2) 분말을 흡입하지 말 것	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	상온 25°C 이하에서 보관
유효기간	제조일로부터 2년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	