

품목허가번호	수인25-4021호
품목명	근관충전용재료
모델명	AH 26
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY DeTrey GmbH (독일)
사용목적	영구적근관충전용
중량 또는 포장단위	분말 1병: 8g, 레진 1 튜브: 10g
사용방법 -파우더와 레진을 믹싱패드 위에서 적당히 혼합한다. -매우 느린 속도로 근침부터 서서히 충전한다. -거타퍼차포인트와 함께 사용하면 유용하며, 과잉충전의 위험이 있을 시에는 리머와 같은 도구를 사용하면 효과적이다.	
사용시주의사항 -치과용으로 사용할 것 -피부에 접촉 시 깨끗이 씻어낼 것 -알레르기가 있는 환자에게는 사용하지 말 것 -유효기간이 지난 제품은 사용하지 말 것	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	상온 25°C이하에서보관
유효기간	제조일로부터5년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참고
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	