

품목허가번호	수인 25-4024 호
품목명	치과용시멘트
모델명	IRM( Intermediate Restorative Material )
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Caulk (미국)
사용목적	임시충전용, 영구적 접착용, 임시적 베이스, 와동 라이너
중량 또는 포장단위	파우더 1 병: 38g, 액 1 병: 14ml
<b>사용방법</b> 가. 혼합비율 1. 파우더 1 스푼 : 리퀴드 1 방울 2. 파우더 : 액체 비율 = 6 : 1 나. 사용방법 1. 필요한 부위에 적당한 와동형성을 한다. 2. 작업부위를 코튼으로 말린다. 3. 치수 노출부위에는 칼슘 하이드록사이드인 다이칼을 도포한다. 4. 스푼에 분말을 정확하게 계량하여 믹싱 패드에 놓고 1 스푼당 액체 1 방울을 떨어뜨려 혼합한다. 5. 혼합된 상태로 형성된 와동에 도포한다. 6. 환자에게 교합을 시키고 나머지 주변부를 정리한다. 7. 경화 후 필요하면 라운드 버를 이용하여 정리한다. 다. 사용 후 보관방법 1. 25°C 이하에서 보관 2. 직사광선을 피할 것 3. 리퀴드는 뒤집어서 보관하지 말 것	
<b>사용 시 주의사항</b> 1. 치과용으로 사용할 것 2. 외부에서보다 구강 내에서 신속한 경화를 하므로 주의 3. 작업 온도와 습도의 상승은 작업시간에 영향을 미침	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	25°C 이하 상온에서 차광보관
유효기간	제조일로부터 2년
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	