

품목허가번호	수인 25-4026 호
품목명	치과용시멘트
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY DeTrey GmbH (독일)
사용목적	-크라운, 브릿지, 인레이, 교정용 브라켓의 접착용 -수복 전의 와동 라이닝 -유치의 임시충전용
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 가. 사용 전 준비사항 형성물 준비 와동 형성 나. 사용방법 1. 시멘트 혼합: 분말 병을 흔든 다음 적량을 믹싱패드 위에 시여한다. 그 위에 액 2~3 방울을 투여한 다음 30 초 내에 믹싱한다. 2. 혼합비율 접착용 분말:증류수=1 스푼:2~3 방울 라이닝 및 충전용 분말:증류수=1 스푼:1 방울 3. 형성물 장착 혼합물을 장착물에 시여한 다음 즉시 치아에 장착한다. 4. 피니싱 초과된 양은 시멘트가 굳은 후 제거한다.	
사용 시 주의사항 1. 치과용으로 사용할 것 2. 분말 시여 시 충분히 흔들어 줄 것 3. 액이 피부에 접촉하면 깨끗이 씻어낼 것	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2025.01
보관 또는 저장방법	밀봉하여 실내온도(약 25°C)에서 보관할 것
유효기간	제조일로부터 3년
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	