

|   |  |
|---|--|
| 품목인증번호  | 수인 98-598 호                                |
| 품목명   | 부가중합형폴리비닐실리콘인상재                            |
| 모델명   | Aquasil Soft Putty                         |
| 수입업자  | 덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) |
| 제조원(제조국)  | Dentsply DeTrey GmbH (독일)                  |
| 사용목적  | 구강 내 인상 채득용 크라운, 브릿지 부분 및 무 치악 인상 채득용      |
| 중량또는포장단위  | Base Paste : 450ml, Catalyst Paste : 450ml |
| <b>사용방법</b><br>가. 사용 전 준비사항<br>- 인상 채득 부위를 깨끗이 소제한다.<br>나. 사용방법<br>- 혼합: 동량의 베이스와 카탈리스트를 단색이 될 때까지 혼합한다.<br>- 트레이장착: 혼합물이 혼합 시작 후 1분 30초 내에 트레이에 투여한다.<br>- 인상채득: 트레이를 구강 내에 삽입한후 인상을 채득한다.<br>다. 사용 후 보관 및 관리방법<br>- 인상 채득분을 차가운 물로 씻어준 다음 에어로 건조시킨다.<br>- 채득한 인상은 직사광선을 피하도록 한다. 사용 후 밀봉한다. |  |
| <b>사용 시 주의사항</b><br>가. 사용 시 주의사항<br>- 치과용으로 사용할 것.<br>- 인화물질과는 멀리할 것.<br>- 눈에 접촉하지 않도록 할 것.<br>- 알루미늄 염산에 기초한 수렴제와는 함께 사용하지 말 것.<br>나. 사용금지<br>- 임시 리라이닝용으로 사용금지.<br>- 폴리에테르 또는 폴리설파이드 재료와는 함께 사용하지 말 것.  |  |
| 첨부분서의 작성 및 개정 연월  | 2024.10                                    |
| 보관 또는 저장방법  | 사용 후 밀봉하여 섭씨 18°C~25°C에서보관                 |
| 유효기간  | 제조일로부터 3년                                  |
| 제조번호  | LOT번호 참조                                   |
| 제조연월, 사용기한  | 제조자 표시사항 참조                                |
| 부작용 보고 관련 문의처   | 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183                  |
| <b>본 제품은 의료기기임</b>  |  |