

품목신고번호	수신 15-1304호
품목명	치과치석제거기용팁
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Professional (미국)
사용목적	잇몸 상/하방 스케일링에 적용된다. 치주질환의 모든 형태에 대한 치주 세척 근관치료에 사용된다.
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 1) 작동방법 (1) 치료할 치아 또는 근관을 위해 적절한 팁을 선택한다. (2) Ultrasonic Scaler가 low power로 세팅되어 있는지 확인한다. (3) 물 흐름이 빠르게 똑똑 떨어지거나, 작은 스프레이 같이 될 때까지, water control을 조절한다. (4) 얇은 펜 같은 것으로 아주 약한 압력을 가한다. (5) 가벼우나, 안정적인 구강 안, 외부의 지렛대를 사용한다. (6) insert를 조절하여 포인트가 implant의 표면을 향하지 않도록 한다. (7) 살짝 매끄럽고 부드럽게 만진다. (8) 수직, 수평, 비스듬한 브러쉬 같은 stroke를 사용하여 항상 insert tip을 움직이는 상태로 둔다. (9) prophylaxis 절차 시 1개 이상의 SofTip Disposable Prophy Tip을 사용하는 것이 필요하다. 2) O-Ring Care : insert를 핸드피스에 넣기 전, Cavitron insert의 o-ring 수명을 연장하기 위해 다음 사항을 시행한다. (1) 핸드피스 전체를 물로 채운다. (2) o-ring을 물과 검정 고무 재료로 윤활제 바르듯 문지른다. (3) insert가 제대로 장착될 때까지 insert를 부드럽게 핸드피스 쪽으로 돌려 넣는다. 3) 사용후 보관방법 사용 후 세척하거나 소독하면 안된다. 다시 재사용하지 말 것.	
사용 시 주의사항 1) 치과 전문의가 사용한다. 2) 본 제품은 권고하는 power 세팅으로 운영할 것. 3) 팁의 끝부분에서 유량을 확인한다. Higher 유량세팅은 차가운 irrigation을 제공한다. 4) 팁을 구부리거나 개조하지 않는다. 5) 본 제품은 Cavitron 초음파 스케일링 유닛과 호환되게 고안되었으므로 타사 제품과 사용시는 안전성 유효성에 나쁜영향을 미칠 수 있다.	
경고	

1) 본 제품은 멸균포장된 제품이 아니므로 사용전 다음의 지침에 따라 멸균하여 사용한다.

Gravity Steam Sterilization

Full Cycle: Bagged -135°C (275°F) for 3.5 minutes

Pre-vacuum Steam Sterilization

Full Cycle: Bagged -132°C (270°F) for 3 minutes

Alternate Method:

Place non-bagged instruments into the steam autoclave and run at the listed cycles.

2) 살균과 소독제의 사용은 권고하지 않는다.

첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	사용 후 세척하거나 소독하면 안된다. 다시 재사용하지 말 것.
제조번호	LOT번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 일회용 의료기기임. 재사용 금지.	