

품목신고번호	수신 19-926호
품목명	치과용색조가이드
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Degudent GmbH(독일)
제조의뢰원(제조의뢰국)	Dentsply International Inc. Prosthetics Division(미국)
사용목적	보철물의 색조를 결정하기 위하여 사용하는 색 조건표
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법</b> 1) 사용전 준비사항 - 본 제품을 사용하기 전, 제품의 손상이나 불순물의 유무, 이상 유무를 육안으로 확인한다. 2) 사용방법 - 적절한 색상의 쉐이드(shade)를 선택하여 보철물과 비교한다. 3) 사용 후 보관방법 - 사용 후, 씻어내서 물기를 완전히 제거하고 실온에서 직사광선을 피해 보관한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> - 본 제품의 사용목적 이외로는 사용하지 않는다. - 직사광선을 피해 실온에서 보관한다. - 제품을 외관상 확인한 후, 이물질 및 변질의 흔적이 보이면 즉시 폐기해야 한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	직사광선을 피하고 실온 보관한다.
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	