

품목신고번호	수신 19-968 호
품목명	치과주조용왁스
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴트플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동)
제조원(제조국)	DeguDent GmbH (독일)
사용목적	로스트왁스법에 의한 고정식 보철 수복물의 납형 제작용 캐스팅 왁스로 환자 구강 내에서 사용하는 왁스
중량 또는 포장단위	EA
사용방법 1)사용전 준비사항 사용 전 제품의 품질 및 이상 상태를 확인한 후 사용한다. 2)사용방법 • Celtra® Undercoating Wax : 와동 이장 및 크라운 인레이 마진 결정시 사용하며, 점성이 있는 편으로, 마진 부분의 모양을 정확히 획득하기 위해 사용됨 • Celtra® modeling Wax : 경화와 주조의 위치 정확성을 최적화 할 경우에 사용한다. Celtra® Undercoating Wax 보다 강도가 있어, 치아형태로 단단하게 쌓기 위하여 사용 - 적당한 크기로 왁스를 잘라 필요한 부분에 제품을 도포한다. 손이나 기구를 이용하여 원하는 모양으로 성형한다. 경화 후 남은 부품을 제거한다. 제거 후, 왁스가 녹아서 생긴 빈공간에 보철물을 완성한다. 3)사용 후의 보관 및 관리방법 - 사용 후, 직사광선을 피하여 실온에서 보관한다.	
사용 시 주의사항 -본제품의 사용목적외에는 사용하지 않는다. -직사광선을 피하여 실온에서 보관한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	고온, 직사광선 및 습기가 있는 곳을 피하여 보관한다.
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	