

품목신고번호	수신 22-865 호
품목명	근관치료용페이퍼포인트
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Dental(TianJin) Co. Ltd (중국)
제조의뢰자(제조의뢰국)	DENTSPLY Tulsa Dental Specialties (미국)
사용목적	치근관의 건조, 약제 도포에 사용하는 재료
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법</b> 1. 사용 전 준비사항 가. 사용 전 제품의 유효기간(제조일로부터 5년), 포장상태 및 이상여부를 확인합니다 나. 제품의 파손여부를 확인합니다. 2. 사용방법 가. 알맞은 크기를 선택합니다. 나. 근관치료 시 근관에 위치한 타액이나 혈흔 등을 흡수, 건조시킵니다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 가. 본 제품은 일회용이므로 사용된 제품은 재사용하지 않습니다.	
<b>사용 시 주의사항</b> 1. 포장이 손상된 제품은 사용하지 않습니다. 2. 사용된 제품은 폐기하고, 재사용해서는 안 됩니다. 3. 숙련된 치과의사 또는 적절한 병원 환경(장갑, 보안경, 고무 댐을 사용하는)에서만 사용합니다. 4. 모든 환자는 성별 및 지역에 대한 제한 없이 본 제품으로 치료할 수 있습니다. 5. 임산부, 모유 수유 여성 및 어린이에게는 안전성과 효과가 유효하지 않습니다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	본 제품은 일회용이므로 사용된 제품은 재사용하지 않는다.
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 일회용 의료기기임 재사용 금지</b>	