

품목신고번호	서울수신 01-2749호
품목명	의료용클립
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Caulk (미국)
사용목적	본 제품은 치아를 수복 시에, 수복물질이 인접치아에 접촉하는 것을 방지하여 줌으로써, 수복한 후 수복면과 인접면을 폴리싱(광택)할 때 소용되는 시간과 경비를 절감시켜준다.
중량 또는 포장단위	KIT
<b>사용방법</b> 1) 사용방법 (1) BiTine Ring을 수복할 치아에 집계를 이용해서 적용한다. (2) 수복할 면을 깨끗이 소제한다. (3) BiTine Ring을 제거한 후, 매트릭스를 적용한다. (4) BiTine Ring을 이용하여 매트릭스를 고정시킨다. (5) 치아를 수복한다. 2) 사용 후 보관방법 (1) BiTine Ring 은 Autoclave에서 180°C이하로 멸균하여 보관한다. (2) 매트릭스는 일회용이므로 사용한 것은 전염 가능성이 있으므로 사용 후 즉시 처분하도록 한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> BiTine Ring이 탄력성을 가지고 있으므로, 사용 시 무리한 힘을 가하지 말 것.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	BiTine Ring은 Autoclave에서 180°C이하로 멸균하여 보관한다. 단, Matrix는 일회용이므로 사용한 것은 전염 가능성이 있으므로 사용 후 즉시 처분하도록 한다.
제조번호	LOT번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임(Matrix는 일회용의료기기이므로 재사용금지)</b>	