

품목신고번호	서울수신 02-2266호
품목명	치과용왁스
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DeguDent GmbH (독일)
사용목적	치과보철물제작 및 치과진료에 사용하는 재료로써 4가지 염료 Plastodent 스틱(빨, 녹, 파, 노란색)을 포함 각각 왁스 업 기술의 부분적 요구에 맞는 작업특성을 진행해가는 왁스 합성물이다.
중량 또는 포장단위	Package
<b>사용방법</b> (1) 치과용 모델을 완성한다. (2) 완성된 치아모델의 보철물 제작할 곳에 Wax를 열로 잘 연화하여 치아형태를 만든다.	
<b>사용 시 주의사항</b> (1) 왁스작업에 필요한 도구는 깨끗한 것을 고른다. 검정색 모델링 기구 팁은 온도가 높고 올라갈 경우 왁스가 과열되고 화학적으로 변형될 수 있기 때문이다. (2) 모델링 왁스는 전기도구 등으로 작업하여 더 정밀하게 원하는 형태를 얻을 수 있다. (3) Plastodent Wax는 DIN standard 13908에 따라서 잔여물 없이 연소된다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	실온의 습기가 적은 곳에서 보관한다.
유효기간	제조일로부터 10년
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	별도 표기
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	