

품목신고번호	서울수신 04-60호
품목명	의료용클리핑기구
모델명	Instrument Removal System Refill (IRS)
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	Clip instruments 클립의 조형, 절단, 제거, 삽입 등에 사용하는 기구
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법:</b> 가. 사용방법 (1) 근관에 튜브가 곧게 삽입되도록 Gate Drill을 이용하여 근관을 확장한다. (2) ProTaper를 이용하여 덴틴 부위를 절삭하여 파일의 윗부분이 자유롭게 하여 준다. (3) 근관의 크기에 알맞은 IRS를 선택한다. (4) 마이크로 튜브를 파일의 윗 부분에 적용시킨다. (5) Screw Wedge를 튜브 속으로 삽입하여 부러진 파일을 시계 반대방향으로 돌려 튜브의 구멍 난 부분에 위치시킨다. (6) Micro Tube와 Screw Wedge를 왼쪽 방향으로 돌리면서 제거한다. 나. 사용 후 보관방법 121°C이하에서 30분 동안 Autoclave하여 보관한다.	
<b>사용 시 주의사항:</b> -무리한 힘을 가하지 말 것. -살균 소독된 기구만 사용할 것.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	실온보관
유효기간	반영구
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	