

품목신고번호	서울수신 05-1507호
품목명	치과용연마제
모델명	Cavitron JET-Fresh Prophy Powder
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Professional (미국)
사용목적	치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 1) 사용 전 준비사항 제품의 유효기간이 유통기한 내에 있는지 확인하고, 포장이나 제품에 손상이 있는지 확인한 후, 유효기간이 경과했거나 손상이 있는 것은 사용하지 않는다. 2) 사용방법 (1) Cavitron® Air Polishing System의 파우더 챔버에 본 제품을 세계 흔든 후 채워 넣는다. (2) 중심튜브의 위쪽까지 채워지도록 하고 파우더 챔버를 닫고 조인 후 잠근다. (3) 기기를 작동시킨다. (기기 사용법은 제조사에서 제공한 매뉴얼 참조) (4) 적절하게 속도를 조절하여 치아에 분사한다. 3) 사용 후 보관 및 관리방법 35°C이상에서 사용하거나 보관하지 말아야 한다.	
사용 시 주의사항 (1) 사용 전에 흔들어서 사용한다. (2) 35°C이상에서 보관하지 말아야 한다. (3) 5-21°C에서 저장하고 마개를 단단히 조인 상태에서 직사광선을 피해야 한다. (4) 심각한 호흡질환이 있는 환자의 사용 시에는 반드시 전문의료인의 진료를 받아야 한다. (5) 치아수복물의 표면에 본 제품이 지속적으로 접촉되지 않도록 한다. (6) 금기: 소듐 제한 식이요법 중인 환자 (7) 유효기간: 1년	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	5-21°C에서 저장하고 마개를 단단히 조인 상태에서 직사광선을 피해야 한다.
유효기간	제조일로부터 1년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조자 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	