

품목신고번호	서울수신 06-465호								
품목명	의료용치석제거기								
모델명	제조사표시사항참조								
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)								
제조사(제조국)	DENTSPLY Tulsa Dental Specialties (미국)								
제조의뢰자(제조의뢰국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)								
사용목적	Contra Angle은 모든 치아의 접근에 용이하게 되어 있으며, 수술 시 사용하는 현미경과 같은 확대기구와 병행 시 훨씬 좋은 효과를 볼 수 있다.								
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함								
사용방법 (1) 근관의 깊이와 크기에 따라 적당한 Tip을 선택한다. <table border="1" data-bbox="204 835 1222 1070"> <thead> <tr> <th>Tip No</th> <th>사용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~2</td> <td>수복재 잔재들 제거, 치수강의 코어를 제거, Post 제거 시</td> </tr> <tr> <td>2~3</td> <td>치수석 제거, 석회화되고 변형된 근관의 위치를 찾을 때, Orifice의 Fins와 isthmuses부분의 통로를 넓혀줄 때</td> </tr> <tr> <td>3~8</td> <td>Obturation 제거, 부러진 기구 제거 시</td> </tr> </tbody> </table>		Tip No	사용	1~2	수복재 잔재들 제거, 치수강의 코어를 제거, Post 제거 시	2~3	치수석 제거, 석회화되고 변형된 근관의 위치를 찾을 때, Orifice의 Fins와 isthmuses부분의 통로를 넓혀줄 때	3~8	Obturation 제거, 부러진 기구 제거 시
Tip No	사용								
1~2	수복재 잔재들 제거, 치수강의 코어를 제거, Post 제거 시								
2~3	치수석 제거, 석회화되고 변형된 근관의 위치를 찾을 때, Orifice의 Fins와 isthmuses부분의 통로를 넓혀줄 때								
3~8	Obturation 제거, 부러진 기구 제거 시								
(2) 스케일러 기기와 연결하여, 치아의 치석이나, 치근관내 차단물 등을 제거한다.									
사용 시 주의사항 무리한 힘을 가하지 말 것									
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10								
보관 또는 저장방법	실온보관								
유효기간	반영구								
제조번호	LOT번호 참조								
제조연월	제조사 표시사항 참조								
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183								
본 제품은 의료기기임									