

품목신고번호	서울수신 06-466호	
품목명	의료용치석제거기	
모델명	제조사표시사항참조	
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)	
제조사(제조국)	DENTSPLY Tulsa Dental Specialties (미국)	
제조의뢰자(제조의뢰국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)	
사용목적	근관 Preparation 작업 시 안전성을 증가시키는 다양한 각도와 형태를 가지고 있으며, Zirconium Coating은 Tip의 파절을 방지하고 효과적인 삭제를 가능하게 한다.	
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함	
<b>사용방법</b>		
(1) 근관의 크기와 사용부위에 따라 적당한 Tip을 선택한다.		
번호	각도	사용부위
1	80	근관이 좁은 전치부
2	80	근관이 넓은 전치부
3	75	하악 좌측구치 근관 및 상악 우측구치의 협측근관
4	110	하악 좌측구치의 설측근관 및 상악 우측구치의 설측근관
5	75	하악 우측구치의 협측근관 및 상악 좌측구치의 협측근관
6	110	하악 우측구치의 설측근관 및 상악 좌측구치의 우측근관
(2) 스케일러 기기와 연결하여 치수석이나, 치근관내 이물질 등을 제거한다.		
<b>사용 시 주의사항</b>		
무리한 힘을 가하지 말 것		
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10	
보관 또는 저장방법	실온보관	
유효기간	반영구	
제조번호	LOT번호 참조	
제조연월	제조사 표시사항 참조	
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183	
<b>본 제품은 의료기기임</b>		