

품목신고번호	서울수신 06-467호
품목명	의료용충전기
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	각 부위에 주사기 방식의 MTA GUN이나 충전기 방식의 MANUAL CARRIER, SURGICAL CARRIER를 선택할 수 있어, 효율적인 충전을 가능하게 한다.
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 (1) MTA GUN SYSTEM 사용 시 ① PRO ROOT MTA 파우더와 액체를 혼합 후 용기에 담는다. ② MTA GUN을 조립하고, HEAD TIP 부분을 위 화살표와 같이 혼합된 PRO ROOT MTA안에 넣는다. ③ 시술할 부위에 적용한다. (2) MTA ENDO MANUAL CARRIER A0407 & MTA SURGICAL CARRIERS A0408 사용 시 ① 혼합된 PRO ROOT MTA를 CARRIER 튜브에 채운다. ② 시술부위에 CARRIER를 위치시키고, 손으로 압력을 주어 PRO ROOT MTA를 최대한 밀어 넣는다.	
사용 시 주의사항 무리한 힘을 가하지 말 것.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	실온보관
유효기간	반영구
제조번호	LOT번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	