

품목신고번호	서울수신 06-701호
품목명	의료용충전기
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	거탑퍼차 등의 근관 충전재의 충전에 사용하며, 다양한 size가 있으므로 편리하게 사용할 수 있다.
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 (1) 사용 전 준비사항 근관 확대 후 Paper point를 이용하여 근관을 완전히 건조시킨다. (2) 사용방법 알맞은 Size를 선택한 후 충전재를 충전한다. (3) 사용 후 보관방법 Autoclave에서 180도 이하로 멸균 소독하여 보관한다.	
사용 시 주의사항 알맞은 Size를 선택하여 사용한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	실온보관
유효기간	반영구
제조번호	LOT번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	