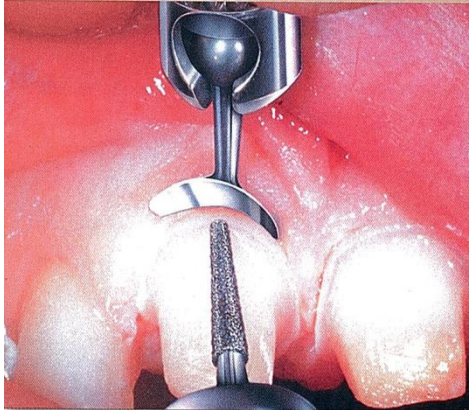


품목신고번호	서울수신 08-715호
품목명	의료용가아드
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	잇몸 조직의 보호를 위하여 사용하는 기구
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법</b> 	
(1) 사용하고자 하는 부위에 회전막대를 연결한 protector를 올려놓고 단단하게 고정시킨다. (2) gum과 입술 사이에 솜 뭉치를 넣어 환자의 입술을 보호한다. (3) 치아의 목(tooth neck)부분의 반대편으로 protector를 눌러 고정시키고 치아 preparation을 시술할 것 (4) spray로 과열을 방지할 것	
<b>사용 시 주의사항</b> (1) 과도한 힘(압력)을 가하지 말 것 (2) 치과용으로만 사용할 것	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	상온보관
제조번호	LOT번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	