

품목신고번호	서울수신 10-1461호
품목명	의료용절삭기구
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	Prima Dental Manufacturing Ltd (영국)
제조의뢰자(제조의뢰국)	Sirona Dental Systems GmbH (독일)
사용목적	천자기, 천공기 및 핸드피스 등에 사용하는 절삭용 버(burr)
중량 또는 포장단위	EA
<b>사용방법</b> 1) 사용 전 준비사항 -핸드피스에 기구 연결 시 정확하게 연결되었는지 확인한다. 느슨하게 연결되거나 연장하여 연결했을 경우 상처를 입을 수 있다. -증기 멸균기에 기구를 넣고 134°C에서 최소 3분간 멸균소독한다. 2) 사용방법 -사용할 버를 선택한다. -일반적으로 길고 작은 사이즈의 carbide bur를 anterior나 bicuspid에 사용하고, 길고 큰 사이즈의 carbide bur는 molar teeth에 사용한다. 이 긴 길이의 버는 핸드피스의 헤드 부분을 occlusal table에서 멀리 옮겨 시술자가 좀 더 잘 보게 해준다. 이러한 버를 사용하여 점진적으로 치아의 크라운 안쪽으로 내려가 pulp chamber로 들어가고, pulpal root에 있는 덴틴을 제거한다. 3) 사용 후 보관방법 사용된 버를 버 홀더 또는 버 블록에 넣어서 초음파세척기로 세척해야 한다. 초음파세척 시 진동으로 인해 버의 표면이 손상될 수 있기 때문에 반드시 버 홀더 또는 버 블록에 넣어서 초음파 세척을 해야 한다. 세척이 끝난 버는 건조기에 넣고 190°C에서 6분 동안 건조시킨다. 위 절차가 끝나면 습기가 없는 건조한 장소에서 보관해야 한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> -치아에 따라 알맞은 형태를 선택하여 사용한다. -사용 시 무리한 힘을 가하지 말 것.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	습기가 없는 건조한 장소에 보관
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	