

품목신고번호	서울 수신 10-1844 호
품목명	치과치석제거기용팁
모델명	개별기재
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	Sirona Dental Systems GmbH(독일)
사용목적	치과용 치석제거기에 사용되는 팁
중량 또는 포장단위	1 SET
사용방법 가. 사용 전 주의사항 1) 핸드피스 청결 상태를 확인한다. 2) 관련 렌치등 필요 부품 및 부분품의 준비 상태를 확인 한다. 3) 정해진 순서에 따라 팁의 체결 준비를 한다. 나. 사용방법 및 조작순서 팁 종류와 유형은 형상 및 구조 - 외형 참조 치과용치석제거기 또는 전동식치과용핸드피스(기허가품)에 치석제거용 팁을 제공되는 렌치를 이용하여 체결 후 치석부위에 대고 치석을 제거한다. 다. 사용 후 보관방법 세척 건조하여 보관한다.	
사용시주의사항 (1) 제공되는 팁 게이지를 이용하여 팁의 마모상태를 확인한다. (2) 허가된 핸드피스류와 체결이 되는지 확인 한다. (3) 사용 전, 후 청결 유지에 유의한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	세척 건조하여 보관한다.
제조번호	제조원 표시사항 참조
제조연월	제조원 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	