

품목신고번호	서울수신 10-1948호
품목명	수동식재사용가능의료용천자기
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	치아 근관을 천자하는 수동식 기기
중량 또는 포장단위	EA


#### 사용방법

##### 1. 사용 전 준비사항

Autoclave에서 134°C로 18분 동안 멸균 후 사용한다.

##### 2. 사용방법

EasyPost Precision Drill N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6의 순서로 근관을 치료한다. (권당 rpm:

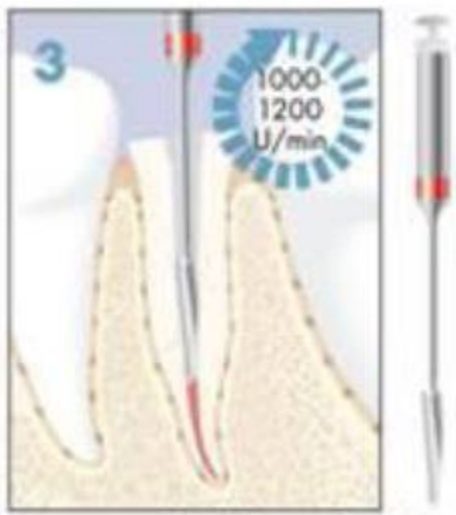

1,000~1,200)

##### 3. 사용 후 보관 및 관리방법

-파일은 사용 후 반드시 멸균(Autoclave에서 134°C에서 18분)하여 보관한다.

-멸균방법(EN 13060, EN 285)

- 1) 비누와 온수로 기구를 닦는다.
- 2) 희석된 물 혹은 이온을 제거한 물로 깨끗하게 헹군다.
- 3) 에어드라이 한다.
- 4) Autoclave tray에 기구를 넣는다.
- 5) 희석된 물 혹은 이온을 제거한 물을 사용한다.
- 6) Autoclave에서 134°C로 18분 동안 멸균한다.

**사용 시 주의사항**

모든 새 제품은 사용이 익숙해질 때까지 보호대(safeguard) 등을 갖추고 충분한 연습시술을 거친 뒤 사용할 것.

- 1) 본 제품 사용 시, Low speed의 핸드피스를 준비할 것.
- 2) 800 ~ 1,200 rpm 범위 내에서 사용할 것.
- 3) 다양한 용도로 사용 시 무리를 주게 되어 부러질 수도 있음
- 4) 적절한 근관 확장의 가장 기본이 되는 Straight line access를 시행한다.
- 5) 최소한의 apical 압력을 가할 것. 항상 근관에 사용 시 무리한 힘을 가하지 말 것.
- 6) 시술 중 종종 근관에서 빼내어 흠(flute)을 세척할 것
- 7) 시술 절차 내내 canal을 irrigation 할 것
- 8) 심한 굴곡 부분이나 apical(치수첨공) 부위에는 특히 주의를 기울여 시술할 것
- 9) 근관의 크기에 맞는 사이즈로 시술할 것

첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	실온보관
유효기간	반영구
제조번호	LOT번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 의료기기임</b>	