

품목신고번호	서울수신 11-239호
품목명	의료용측정자
모델명	제조사표시사항참조
수입업자의 상호와 주소	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	해부학적 구조의 규격을 측정하여 보철물 교체와 이식조직의 규격을 결정하기 위한 기구
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 1. 사용 전 준비사항 Autoclave에서 134°C로 18분 동안 멸균 후 사용한다. 2. 사용방법 천자된 근관에 알맞은 사이즈의 게이지를 선택하여 근관의 길이 및 직경을 측정한다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 -사용 후 반드시 멸균(Autoclave에서 134°C에서 18분)하여 보관한다. -고온다습 한 곳을 피하고 상온보관 한다. -멸균방법(EN 13060, EN 285) 1) 비누와 온수로 기구를 닦는다. 2) 희석된 물 혹은 이온을 제거한 물로 깨끗하게 헹군다. 3) 에어드라이 한다. 4) Autoclave tray에 기구를 넣는다. 5) 희석된 물 혹은 이온을 제거한 물을 사용한다. 6) Autoclave에서 134°C로 18분 동안 멸균한다.	
사용 시 주의사항 -시술 예정 부위의 사이즈에 적합한 게이지를 선택하여야 한다. -사용 전 반드시 게이지를 소독(134°C, 18분)한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	실온보관
유효기간	반영구
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	