

| | |
|---|--|
| 품목신고번호 | 서울수신 12-1083호 |
| 품목명 | 치과용연마제 |
| 모델명 | 제조사 표시사항 참조 |
| 수입업자 | 덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) |
| 제조원(제조국) | DENTSPLY Caulk (미국) |
| 제조의뢰자(제조의뢰국) | DENTSPLY DeTrey GmbH (독일) |
| 사용목적 | 치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료 |
| 중량 또는 포장단위 | 제조원의 포장단위에 의함 |
| 사용방법 1. 사용 전 준비사항 구강 내의 치아를 세척한다. 2. 사용방법 치과용 핸드피스에 폴리싱컵을 장착하고 적정량의 페이스트를 도포한 후 핸드피스의 회전력을 이용하여 착색을 제거한다. 3. 사용 후 보관 및 관리방법 -사용 후 반드시 마개를 닫아야 한다. -직사광선을 피하고 8~25°C 온도의 환기가 잘 되는 장소에서 보관한다. -습기가 없는 장소에서 보관한다. -냉동시키지 말아야 한다. | |
| 사용 시 주의사항 1. 본 제품은 반드시 치과면허를 소지한 자만이 사용할 수 있다. 2. 사용하는 동안 보안경과 장갑을 착용해야 한다. 3. 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 말아야 한다. | |
| 첨부분서의 작성 및 개정연월 | 2024.10 |
| 보관 또는 저장방법 | -사용 후 반드시 마개를 닫아야 한다. -직사광선을 피하고 8~25°C 온도의 환기가 잘 되는 장소에서 보관한다. -습기가 없는 장소에서 보관한다. -냉동시키지 말아야 한다. |
| 유효기간 | 제조일로부터 3년 |
| 제조번호 | LOT번호 참조 |
| 제조연월, 사용기한 | 제조사 표시사항 참조 |
| 부작용 보고 관련 문의처 | 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183 |
| 본 제품은 의료기기임 | |