

품목신고번호	서울수신 12-1347 호
품목명	치과용연마제
모델명	제조사 표시사항 참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	DENTSPLY Caulk (미국)
제조의뢰자(제조의뢰국)	DENTSPLY DeTrey GmbH (독일)
사용목적	치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료
중량 또는 포장단위	제조원 포장단위에 의함
<b>사용방법</b> 가. 사용 전 준비사항 - 사용하기 전에 피니싱 버를 사용하여 치아 수복물의 형태를 이룬 후 거친 면이 없도록 한다. - 피니싱 또는 폴리싱 기구를 핸드피스에 연결한다. 나. 사용방법 - 최상의 광택을 얻기 위해서 저속으로 연마하도록 한다. - 가능한 한 연마제의 많은 면을 수복물에 접촉시켜 연마하면 보다 나은 광택을 얻을 수 있다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 - 사용된 연마제는 재사용하지 말고 폐기한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> - 사용 시 무리한 힘을 가하지 말아야 한다. - 고속 핸드피스와는 결합하여 사용하지 말아야 한다. - 일회용으로만 사용해야 한다. - 유효기간: 제조일로부터 3년	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	- 사용된 연마제는 재사용하지 말고 폐기한다. - 습기가 없는 장소에서 보관한다.
유효기간	제조일로부터 3년
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
<b>본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용금지</b>	