

품목신고번호	서울수신 12-1933호
품목명	보철물분리재
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	DENTSPLY Trubyte (미국)
사용목적	보철물을 제작 또는 임시 점착하는 과정에서 치아에 견고하게 부착되지 않도록 미리 도포하는 제재
중량 또는 포장단위	EA
사용방법	일정량을 스톤 모형에 붓으로 도포한 후 레진을 빌드업 하며 중합시킨다. 완성 후 스톤 모형에서 레진을 분리시킨다.
사용 시 주의사항	<p><u>금기사항</u> 본 제품의 성분에 민감한 환자에게는 본 제품을 사용하지 말 것. 반드시 치과용으로만 사용할 것</p> <p><u>저장조건</u> 온도: -10°C~25°C. 직사광선을 피하여 보관. 사용 후 제품의 포장을 닫을 것. 유효기간이 지난 제품은 사용하지 말 것</p>
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	습기가 없는 건조한 장소에 보관(온도: -10°C~25°C)
유효기간	3년
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	