

품목신고번호	서울수신 12-1936호
품목명	치과용연마제
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Degudent GmbH (독일)
사용목적	치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료
중량 또는 포장단위	EA
사용방법 (1) 사용 전 준비사항 구강 내의 치아를 세척한다. (2) 사용방법 치과용 핸드피스에 폴리싱 컵을 장착하고 적정량의 페이스트를 도포한 후 핸드피스의 회전력을 이용하여 착색을 제거한다. (3) 사용 후 보관 및 관리방법 사용 후 반드시 마개를 닫아야 한다. 직사광선을 피하고 8~25°C 온도에 환기가 잘 되는 장소에서 보관한다. 습기가 없는 장소에서 보관한다. 냉동시키지 말아야 한다.	
사용 시 주의사항 본 제품은 치과면허를 소지한 자만이 사용할 수 있다. 사용하는 동안 보안경과 장갑을 착용해야 한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	직사광선을 피하고 8-25°C의 습기가 없는 장소에서 보관
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 의료기기임	