

| | |
|---|---|
| 품목신고번호 | 서울수신 12-1938호 |
| 품목명 | 치과용연마제 |
| 모델명 | N850677 Neoloy Special Hard Model Dip |
| 수입업자 | 덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) |
| 제조원(제조국) | DENTSPLY Trubyte (미국) |
| 사용목적 | 치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료 |
| 중량 또는 포장단위 | EA |
| 사용방법 (1) 사용 전 준비사항 반드시 환기가 잘 되는 장소에서만 사용해야 한다. (2) 사용방법 전기 수조에 연마용액을 붓고 연마할 재료를 천천히 담근 후 전기 수조의 전원을 켜 후 표면 연마를 시작한다. (3) 사용 후 보관 및 관리방법 사용 후 남은 연마용액은 용기 뚜껑을 완전히 닫은 다음 환기가 잘 되는 장소에 차광 보관한다. | |
| 사용 시 주의사항 연마 용액을 사용하기 전에 반드시 보호안경, 마스크, 보호장갑, 보호복을 착용해야 한다. 사용 후 남은 연마용액은 용기 뚜껑을 완전히 닫은 다음 통풍이 잘 되는 장소에 차광 보관한다. 눈에 접촉했을 경우, 충분한 양의 물로 씻고 의사의 진단을 받아야 한다. 반드시 환기가 잘 되는 장소에서만 사용해야 한다. 유효기간: 반영구 | |
| 첨부분서의 작성 및 개정연월 | 2024.10 |
| 보관 또는 저장방법 | 통풍이 잘 되는 장소에 차광보관 |
| 제조번호 | 제조사 표시사항 참조 |
| 제조연월 | 제조사 표시사항 참조 |
| 부작용 보고 관련 문의처 | 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183 |
| 본 제품은 의료기기임 | |