

품목신고번호	서울수신 12-2133호
품목명	치과용연마제
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조사(제조국)	DENTSPLY Caulk (미국)
제조의뢰자(제조의뢰국)	DENTSPLY Professional (미국)
사용목적	치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법</b> (1) 사용방법 ① 사용 전 준비사항 구강 내의 치아를 세척한다. ② 사용방법 치과용 핸드피스에 폴리싱 컵을 장착하고 적정량의 페이스트를 도포한 후, 핸드피스의 회전력을 이용하여 착색을 제거한다. (2) 저장방법 25°C(77°F) 이하의 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> (1) 불소의 과도한 섭취는 메스거림을 야기시킬 수 있다. 그러므로 본 제품을 삼키지 않고, 뱉어내야 한다. (2) 눈에 접촉하면 통증을 야기시킬 수 있다. 만약 눈에 접촉했다면, 충분한 양의 물로 15분 동안 즉시 씻어낸다. 통증이 계속되면 의사의 처치를 받는다. (3) 반복적인 피부 접촉을 피하고, 만성적인 피부 접촉 때문에 피부염을 유발할 수 있다. 만약, 갑작스런 피부 접촉이 일어날 경우, 물과 비누로 완전히 씻어낸다. (4) 본 제품을 삼키면 타액의 분비, 구역질, 구토가 일어날 수 있다. 과량을 삼키게 되면 복통, 떨림, 경련, 발작이 일어날 수 있다. 호흡기 마비로 죽음에 이를 수도 있다. 만약, 엄청난 양을 삼킬 경우, 즉시 의사를 부르고, 많은 양의 우유나, 우유가 불가능 하다면 물을 마시게 한다. (5) 1개의 컵에는 1회의 시술에 필요한 충분한 양의 제품이 들어있다. 각각의 컵은 한 명의 환자에게 사용해야 한다. 재 사용이나 남은 제품을 다른 환자에게 사용할 경우 교차감염이 일어날 수 있다. (6) 유효기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2024.10
보관 또는 저장방법	25°C(77°F) 이하의 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관한다.
유효기간	제조일로부터 24개월
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월, 사용기한	제조사 표시사항 참조

부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

본 제품은 의료기기임



서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동) (우) 05836

TEL : 02-2008-7600, FAX : 02-6442-7699

[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)